

**10322232 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS,  
ENTRADA DE AR E CON. LUER SLIP  
ANVISA N°80163570006**

**FINALIDADE:**

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp's que se adaptem em conectores padrão com conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

**COMPOSIÇÃO:**


1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro, para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
6. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
7. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
8. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1:2003 e 594-2:2003 para seringas e agulhas.
9. Tampa protetora para o conector luer slip.

**ROTULAGEM:** Modelo de Rotulo

EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191   DISTRITO INDUSTRIAL   CEP: 84.990-000   ARAPOTI - PR   (CNPJ Nº 33.585.001-43)   E: 800874400 FONE: (43) 3512-2800   <a href="mailto:sac@medsonda.com.br">sac@medsonda.com.br</a>   Fone: Teresopolis, Rio de Janeiro (RJ) - Fone: (21) 2509-9000	
<b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA ANESTESIA. ESTE PRODUTO NÃO É UM DE USO DE PRODUÇÃO EM MASSA. PRODUTO DE USO ÚNICO. NÃO REUSAR. O PRODUTO DEVE SER USADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES. O PRODUTO DEVE SER USADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES. O PRODUTO DEVE SER USADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES. O PRODUTO DEVE SER USADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES. O PRODUTO DEVE SER USADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES.	1- ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR 2- INDICADO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL. 3- COMPATÍVEL COM CONECTORES LUER, CONICIDADE 6%. 4- ABERTA PARA AVALIAÇÃO DE FORMA ASÉPTICA. 5- FECHAR O REGULADOR DE FLUXO. 6- SE ENTRA EM CONTATO COM SOLUÇÕES PARENTERAIS E CONECTOR ADAPTAÇÃO DE FLUXO. 7- MODELO COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAMENTO. 8- REGULAR O FLUXO PRECISANDO, INDICANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
<b>ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</b>	<b>VER INSTRUÇÕES DE USO</b>
USAR SEMPRE SE A BOMBA FOR DE USO ÚNICO E SE ENTRA EM CONTATO COM SOLUÇÕES PARENTERAIS. LIMPAR COMBATE DE FOCO DE CONTAMINANTE ESTERILIZANDO ANTERIORMENTE CONDIÇÕES. PRODUTO DE USO ÚNICO. NÃO REUSAR. O PRODUTO DEVE SER USADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES. O PRODUTO DEVE SER USADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES. O PRODUTO DEVE SER USADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES.	VER INSTRUÇÕES DE USO <a href="http://www.medsonda.com.br">www.medsonda.com.br</a>
<b>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO</b>	<b>MODELOS COMERCIALIZADOS</b>
MANTER EM LOCAL SECO, LUER E TEMPERATURA AMBIENTE.	10322232 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10322233 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322234 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322235 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322236 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322237 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322238 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322239 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322240 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322241 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322242 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322243 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322244 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322245 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322246 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322247 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322248 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322249 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322250 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP
<b>Saúde</b> Compulsório INMETRO	<b>USO ÚNICO</b> NÃO REUTILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR
<b>STERILE EO</b> MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Validade 4 anos após a data de fabricação

10322232 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART.  
ENT. AR CONEC. LUER SLIP 150 CM  
LOTE OP:00000 FAB/ESTÉRIL 00/16  
ANVISA N° 80163570006

7898487864078

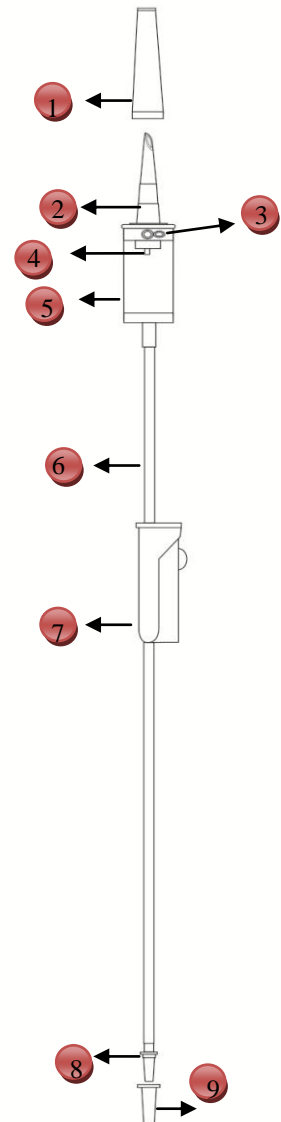

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	04	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	05	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	06	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".