

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão N°03	<b>INSTRUÇÃO DE USO - EXTENSOR PARA OXIGENOTERAPIA E VÁCUO</b> IU 5.006	Emissão: 02/2022	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	--	---------------------	---

#### **Especificação Técnica:**

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Comprimento: 100; 150; 200; 201- 206; 250 cm e 300cm.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

#### **Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

#### **Advertências e Precauções:**

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria a ser usada;

Use sempre técnica asséptica quando for manusear o cateter;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

#### **Indicação de Uso:**

É indicado como extensores para sistema de gases medicinais.

É utilizado para conectar o balão de oxigênio com a máscara de oxigênio, ou conectar o sistema de vácuo com uma sonda de aspiração.

#### **Contraindicação:**

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

#### **Modo de Uso:**

A escolha quanto ao uso dos extensores deve ser feita pelo médico.

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica.

Conectar as extremidades do extensor.

Conector Luer deve haver compatibilidade com conector de sondas e aparelhos para sucção e oxigenoterapia.

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

Produto estéril e de uso único.

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.

**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 Cep 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163570007.

 <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>	<b>Revisão N°03</b>	<b>INSTRUÇÃO DE USO - EXTENSOR PARA OXIGENOTERAPIA E VÁCUO IU 5.006</b>	<b>Emissão: 02/2022</b>	 <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>
--	-------------------------	---	-----------------------------	--

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
10/2021	02	Rogerio S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogerio S. Soares”. Inclusão de Contraindicações.
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Rogerio S. Soares” para “Gessica Dias Correia”.