

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão N°03	INSTRUÇÃO DE USO BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL IU 5.009	Emissão: 02/2022	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	--	---------------------	---

Especificação Técnica:

Polietileno virgem especial

Fita adesiva antialérgica

Capacidade: 250 ml

Orifício circular de abertura: 30; 50 e 63 mm

Dimensões: 12 x 24 cm

Produto Não Estéril. Uso único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto não estéril e de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

Para coleta de material fecal em pacientes colostomizados, em período pós-cirúrgico ou com antecedente cirúrgico de derivação intestinal.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

A escolha quanto ao uso das bolsas deve ser feita pelo médico.

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica.

Fixe a bolsa ao corpo do paciente com a fita adesiva antialérgica.

Introduzir na bolsa a sonda de coleta do material.

Terminada a coleta, retirar a sonda e substituir por uma nova.

Após o uso, descartar em lugar apropriado.

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

Produto não estéril e de uso único.

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570013.

 MEDSONDA <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>	Revisão N°03	INSTRUÇÃO DE USO BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL IU 5.009	Emissão: 02/2022	 MEDSONDA <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>
---	-------------------------	--	-----------------------------	---

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
10/2021	02	Rogerio S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogerio S. Soares”. Inclusão de Contraindicações.
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Rogerio S. Soares” para “Gessica Dias Correia”.