

**COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000 ML****Especificação Técnica:**

Saco plástico translúcido atóxico, com capacidade de 2000 ml, confeccionado em Polietileno inodoro e resistente.

Escala volumétrica impressa no coletor de 100 em 100 ml.

Local para anotações de dados do paciente.

Cordão para sustentação e manipulação do coletor.

**Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

**Advertências e Precauções:**

Produto não estéril e de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não pode ser reutilizado.

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

**Indicação de Uso:**

É um artigo destinado a uso médico hospitalar, utilizado para a coleta de urina em paciente que se estiverem com sonda uretral.

**Modo de Uso:**

A escolha quanto ao uso dos dispositivos deve ser feita pelo médico.

Retirar o produto da embalagem.

Conectar a sonda uretral ao reservatório.

Assim que o reservatório estiver cheio, esvazie e/ou substitua o produto.

Após o uso, descartar em lugar apropriado.

**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163570046.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES**

<b>Data</b>	<b>Revisão</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alterações</b>
06/2017	00	Joelma C. Brizola	Atualização do registro na Anvisa do coletor de urina com cordão