


**10317022 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PART. ENT. AR , INJ.  
LAT. VALVULADO E CONECTOR LUER SLIP  
ANVISA Nº80163570006****FINALIDADE:**

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalpels que se adaptem em conectores conforme NBR ISO 80369-7:2022.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
  2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2024 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
  3. Filtro de ar hidrofóbico.
  4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada
  5. Filtro particulado 15 micras.
  6. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
  7. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
  8. Injetor Lateral valvulado com membrana auto vedante para administração de soluções em procedimento.
  9. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
  10. Conector luer slip conforme NBR ISO 80369-7:2022.
  11. Tampa protetora para conector luer slip.
- 12. FREE LÁTEX**

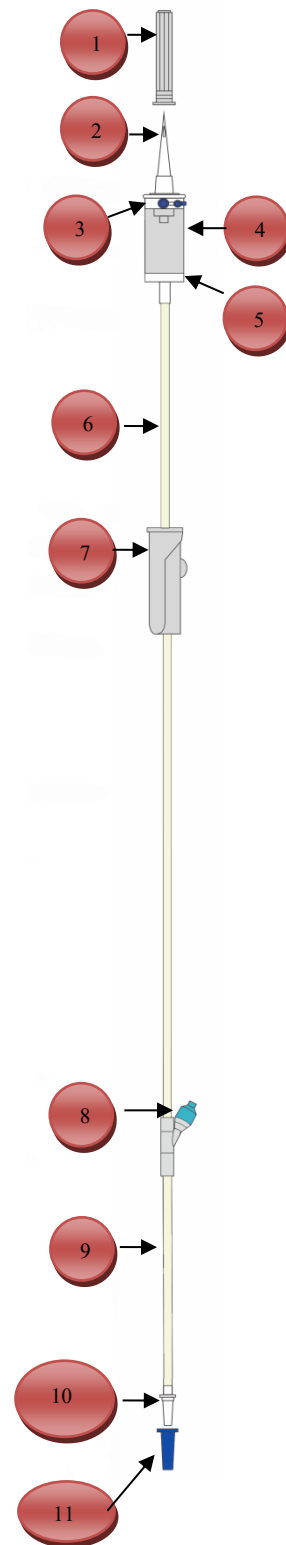

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

 <p>PRODUTOS PARA SAÚDE</p>	<p>Revisão N°04</p>	<p>FICHA TÉCNICA FT 8.066</p>	<p>Emissão 04/2025</p>	 <p>PRODUTOS PARA SAÚDE</p>
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

**EMBALAGEM:**

↑  
ABRIR  
↑

**EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL G**

FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO : MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA  
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 | DISTRITO INDUSTRIAL | CEP: 84990-000 | ARAÇATI - PR | CNPJ: 05.150.338/0001-43 | IE: 9026874405  
FONE: 43 3512 2800 | [iss@medsonda.com.br](mailto:iss@medsonda.com.br)  
RESP. TÉCNICA: REGIANE GAVLAK | CRQ - PR 09201294 | [www.medsonda.com.br](http://www.medsonda.com.br)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	INSTRUÇÕES DE USO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- COMPRIMENTO 150CM;</li> <li>- ESTE PRODUTO ESTÁ LIVRE DE PIROGÊNICOS;</li> <li>- ATÓXICO;</li> <li>- ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR ISO 8536-4:2024.</li> <li>- 20 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE (1x1) ML, CU MASSA DE (1x1) 1g;</li> <li>- COMPATÍVEL COM CONEXÃO LUER ABNT NBR ISO 80369-7.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - FINALIDADE : ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE REQUISITE DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA;</li> <li>2 - ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA SÉPTICA;</li> <li>3 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO;</li> <li>4 - RETIRAR A TAMPAPROTETORA DA PONTA PERFORANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO;</li> <li>5 - MODELOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDIÇÃO;</li> <li>6 - REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.</li> </ol>

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

- UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE;
- UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS
- PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO;
- EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC COM DOP NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA FORMULAÇÃO PACTANEL.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.

**MODELOS COMERCIALIZADOS**

10315232 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER ROTATIVO  
10315202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP  
10315002 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULAS ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP  
10312202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP  
10312102 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULAS E CONECTOR LUER SLIP  
10317001 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROT.  
10317022 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP



Compulsório  
INMETRO

**ANVISA Nº 80163570006**

NÃO REESTERILIZAR  
PROIBIDO REPROCESSAR




PRODUTOS PARA SAÚDE

Validade 4 anos após a data de fabricação

CONTÉM 1 UNIDADE  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES EM [WWW.MEDSONDA.COM.BR](http://WWW.MEDSONDA.COM.BR)

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2019	02	Milena C. Rivera	Item 8. Alteração da palavra auto cicatrizante para auto vedante.
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	04	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.