

	Revisão Nº04	<b>INSTRUÇÃO DE USO</b> <b>DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA</b> <b>URINARIA MASCULINO</b> <b>IU 5.017</b>	Emissão: 02/2022	
--	-----------------	--	---------------------	--

#### Especificação Técnica:

Tubo de PVC de 100 e 130 cm de comprimento.  
 Conector com configuração cônica tipo macho de engate.  
 Conector com configuração cônica tipo fêmea de engate.  
 Preservativo (látex).  
 Tamanhos: G (equivale ao tamanho 7 com diâmetro 52 mm).  
 Estéril. Esterilizado a Óxido de Etileno. Uso Único. Proibido Reprocessar.

#### Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

#### Advertências e Precauções:

Produto estéril de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.  
 Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado.  
 Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.  
 A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.  
 Produto de uso médico hospitalar, estéril, apirogênico e atóxico.

#### Indicação de Uso:

Para pacientes com incontinência urinária. É indicado para transporte de urina e secreções uretrais até a bolsa coletora.

#### Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

#### Modo de Uso:

A escolha quanto ao uso dos dispositivos deve ser feita pelo médico.  
 Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.  
 Retirar o produto da embalagem de forma asséptica.  
 Envolver o pênis com o preservativo.  
 Conectar o tubo na bolsa coletora.  
 Assim que a bolsa estiver cheia, substitua o dispositivo.  
 Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.

**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Tereza de Sousa Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163570028.

#### CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
10/2021	03	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogério S. Soares". Inclusão de Contraindicações.
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Rogério S. Soares" para "Gessica Dias Correia".