

**COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO NÃO ESTÉRIL**  
**ANVISA Nº80163570029****FINALIDADE:**

Usado como coletor de urina em crianças, para a realização de exames laboratoriais.

**COMPOSIÇÃO:**

Coletor Infantil com furo recortado nos modelos unissex, masculino e feminino.

Fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto.

Composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável.

A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário.

Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml.

Com selagem nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento.

FREE LÁTEX

**EMBALAGEM:**

**MEDSONDA**  
PRODUTOS PARA SAÚDE

COLETOR DE URINA INFANTIL  
CONTÉM 10 UNIDADES  
PRODUTO NÃO ESTÉRIL

**Composição:** Bolsa plástica de PEBD atóxico e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.

**Modo de Usar:** 1. Limpar bem a região a ser aplicada. 2. Retirar o orifício central do produto para a entrada do material a ser coletado. 3. Destacar a película protetora da fita adesiva. 4. Aplicar o produto com suave compressão na área apropriada, aderindo a parte colante na pele da criança. 5. Após a criança urinar retire o produto com delicadeza, se necessário utilizar água morna e vaselina líquida para remoção do adesivo. 6. Após o uso, dobrar o adesivo ao meio obtendo o fechamento do coletor.

**Destruir e descartar em local apropriado.**

**Função:** Produto utilizado para a coleta de urina em paciente infantil.


**Precauções:** O produto não oferece nenhum risco de contato, caso ocorra com pessoas sensíveis ao produto, suspender o uso. Recomenda-se neste caso, orientação médica. Armazenar e transportar o produto em lugar seco e arejado e a temperatura ambiente. Não utilizar o produto com validade vencida.

IDENTIFICAÇÃO DO  
PRODUTO

**Validade 4 anos a partir  
da data de fabricação.**

**MS 80163570029**

Av. Thereza de Souza Carneiro, 1191 - Dist. Industrial - Arapoti / PR  
CEP: 84.990-000 Tel: (43) 3512 2800  
Resp. Técnico: Regiane Gavlak - CRQ/PR: 09201294  
CNPJ: 05.150.338/0001-43 INSC. EST. 9026874405  
sac@medsonda.com.br - Indústria Brasileira  
**MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO**  
facebook.com/Medsonda | twitter.com/Medsonda1

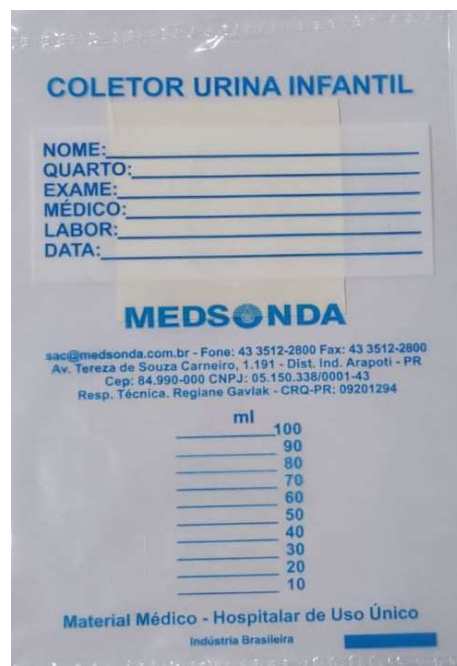

**CÓDIGO: 10501060 COLETOR URINA  
INFANTIL TIPO SACO UNISSEX  
DESCARTAVEL N ESTERIL IU 5.018 REV. Nº 00  
LOTE OP: 00000 FAB/Nº ESTÉRIL: 00/0000  
NÃO VENDER INDIVIDUALMENTE**

7 898487 861992


FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:  
MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA.  
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, 1191 DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 84990-000 ARAPOTI-PR

Em embalagem primária na etiqueta constam os seguintes dados do produto:


- Código;
- Descrição do produto;
- Lote;
- Data de fabricação;
- Cadastro ANVISA;
- Instrução de Uso e Revisão;
- Código de barras.

**IMAGENS ILUSTRATIVAS:**

## FEMININO

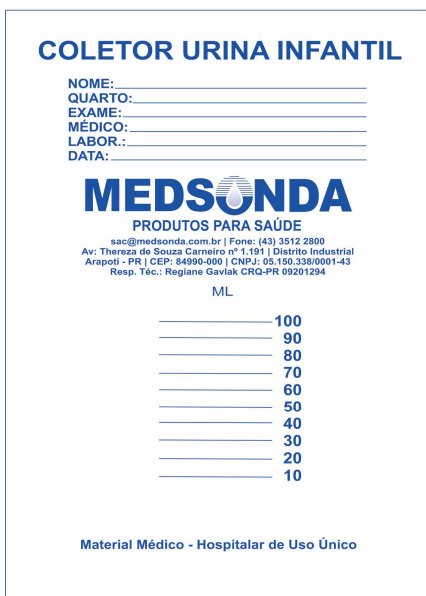

**PARTE FRONTAL**

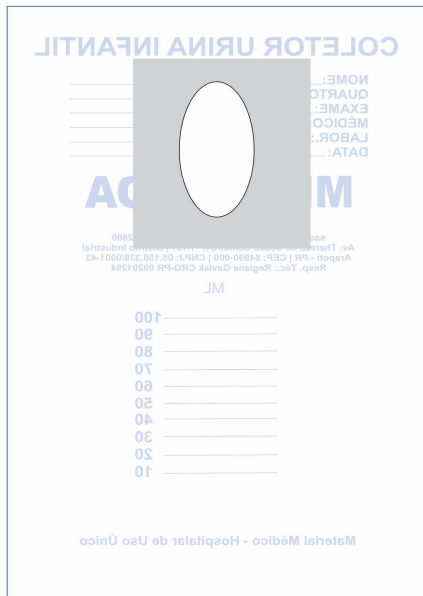

**PARTE TRASEIRA**

## MASCULINO

**COLETOR URINA INFANTIL**

NOME: \_\_\_\_\_  
QUARTO: \_\_\_\_\_  
EXAME: \_\_\_\_\_  
MÉDICO: \_\_\_\_\_  
LABOR.: \_\_\_\_\_  
DATA: \_\_\_\_\_

**MEDSONDA**  
PRODUTOS PARA SAÚDE

sac@medsonda.com.br | Fone: (43) 3512 2800  
Av. Theresza de Souza Carneiro nº 1.191 | Distrito Industrial  
Arapoti - PR | CEP: 84890-000 | CNPJ: 05.150.338/0001-43  
Resp. Téc.: Regiane Gavliak CRQ-PR 09201294

ML

\_\_\_\_\_ 100  
\_\_\_\_\_ 90  
\_\_\_\_\_ 80  
\_\_\_\_\_ 70  
\_\_\_\_\_ 60  
\_\_\_\_\_ 50  
\_\_\_\_\_ 40  
\_\_\_\_\_ 30  
\_\_\_\_\_ 20  
\_\_\_\_\_ 10

Material Médico - Hospitalar de Uso Único

PARTE FRONTAL

**COLETOR URINA INFANTIL**

NOME: \_\_\_\_\_  
QUARTO: \_\_\_\_\_  
EXAME: \_\_\_\_\_  
MÉDICO: \_\_\_\_\_  
LABOR.: \_\_\_\_\_  
DATA: \_\_\_\_\_

**MEDSONDA**  
PRODUTOS PARA SAÚDE

sac@medsonda.com.br | Fone: (43) 3512 2800  
Av. Theresza de Souza Carneiro nº 1.191 | Distrito Industrial  
Arapoti - PR | CEP: 84890-000 | CNPJ: 05.150.338/0001-43  
Resp. Téc.: Regiane Gavliak CRQ-PR 09201294

ML

\_\_\_\_\_ 100  
\_\_\_\_\_ 90  
\_\_\_\_\_ 80  
\_\_\_\_\_ 70  
\_\_\_\_\_ 60  
\_\_\_\_\_ 50  
\_\_\_\_\_ 40  
\_\_\_\_\_ 30  
\_\_\_\_\_ 20  
\_\_\_\_\_ 10

Material Médico - Hospitalar de Uso Único

PARTE TRASEIRA

## UNISSEX

**COLETOR URINA INFANTIL**

NOME: \_\_\_\_\_  
QUARTO: \_\_\_\_\_  
EXAME: \_\_\_\_\_  
MÉDICO: \_\_\_\_\_  
LABOR.: \_\_\_\_\_  
DATA: \_\_\_\_\_

**MEDSONDA**  
PRODUTOS PARA SAÚDE

sac@medsonda.com.br | Fone: (43) 3512 2800  
Av. Theresza de Souza Carneiro nº 1.191 | Distrito Industrial  
Arapoti - PR | CEP: 84890-000 | CNPJ: 05.150.338/0001-43  
Resp. Téc.: Regiane Gavliak CRQ-PR 09201294

ML

\_\_\_\_\_ 100  
\_\_\_\_\_ 90  
\_\_\_\_\_ 80  
\_\_\_\_\_ 70  
\_\_\_\_\_ 60  
\_\_\_\_\_ 50  
\_\_\_\_\_ 40  
\_\_\_\_\_ 30  
\_\_\_\_\_ 20  
\_\_\_\_\_ 10

Material Médico - Hospitalar de Uso Único

PARTE FRONTAL

**COLETOR URINA INFANTIL**

NOME: \_\_\_\_\_  
QUARTO: \_\_\_\_\_  
EXAME: \_\_\_\_\_  
MÉDICO: \_\_\_\_\_  
LABOR.: \_\_\_\_\_  
DATA: \_\_\_\_\_

**MEDSONDA**  
PRODUTOS PARA SAÚDE

sac@medsonda.com.br | Fone: (43) 3512 2800  
Av. Theresza de Souza Carneiro nº 1.191 | Distrito Industrial  
Arapoti - PR | CEP: 84890-000 | CNPJ: 05.150.338/0001-43  
Resp. Téc.: Regiane Gavliak CRQ-PR 09201294

ML

\_\_\_\_\_ 100  
\_\_\_\_\_ 90  
\_\_\_\_\_ 80  
\_\_\_\_\_ 70  
\_\_\_\_\_ 60  
\_\_\_\_\_ 50  
\_\_\_\_\_ 40  
\_\_\_\_\_ 30  
\_\_\_\_\_ 20  
\_\_\_\_\_ 10

Material Médico - Hospitalar de Uso Único

PARTE TRASEIRA

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em embalagem plástica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto não estéril.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

<b>Data</b>	<b>Revisão</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alterações</b>
01/2020	03	Milena Costa Rivera	Inclusão de imagens ilustrativas.
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.