

	Revisão Nº01	INSTRUÇÃO DE USO FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL IU 5.044	Emissão: 10/2021	
---	-----------------	---	---------------------	---

Especificação Técnica:

Frasco de 300 ml e 500ml.

Graduação de 100 em 100 ml em auto-relevo.

Polietileno de Baixa Densidade (PEBD).

Estéril. Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, protegido do sol e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto estéril. Uso único. Proibido reprocessar.

O reuso deste produto poderá ocasionar:

Efeitos biológicos adversos decorrentes de resíduos de produtos, microorganismos e/ ou substâncias decorrentes de resíduos anteriores e/ou do reprocessamento;

A estrutura do frasco sofre alterações das características físicas originais do produto (lacre) que podem prejudicar sua funcionalidade pretendida.

O reuso deste produto não garante sua segurança e eficácia.

Não utilizar o produto se o lacre da tampa estiver rompido.

Somente utilizar o produto se estiver íntegro e dentro do prazo de validade.

Indicação de Uso:

Os frascos de nutrição enteral estéreis são artigos médicos hospitalares destinados ao acondicionamento de nutrição enteral para ser administrado por sonda, através do equipo de nutrição enteral ou via oral.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

- O produto deve ser aplicado e supervisionado por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas para este tipo de produto;
- Abrir a embalagem e retirar o frasco usando técnicas assépticas;
- Retirar a tampa do frasco;
- Colocar a dieta a ser administrada;
- Fechar bem o frasco;
- Conectar o equipo no bico do frasco;
- Descartar o produto após o uso de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570049

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº01	INSTRUÇÃO DE USO FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL IU 5.044	Emissão: 10/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	---	---------------------	---

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
07/2020	00	Milena Costa Rivera	Elaboração
10/2021	01	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogerio S. Soares". Inclusão de Contraindicações.