
 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº01	<b>INSTRUÇÃO DE USO</b> <b>EQUIPO IRRIGADOR SISTEMA FECHADO</b> <b>IU 5.045</b>	Emissão: 05/2025	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	---	---------------------	---

#### **Especificação Técnica:**

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Perfuradores apresentam compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais.

Tubo comprimento: 10 cm.

Estétil. Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

#### **Condições de Armazenamento e Transporte:**

Conservar a embalagem em local limpo, seco e em temperatura ambiente. No transporte tomar as devidas precauções, tais como, não jogar, não amassar, não rasgar, não perfurar.

#### **Advertências e Precauções:**

A escolha e as orientações quanto ao uso dos produtos devem ser feitas por profissional qualificado.

Utilizar técnica asséptica durante o manuseio.

Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem.

Verificar se as conexões e componentes do produto suportam as condições normais de uso.

O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

Após o uso, descartar de acordo com a legislação vigente.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

#### **Indicação de Uso:**

Dispositivos indicados para irrigação de cavidades e/ou perfusão de órgãos em cirurgias. A principal finalidade deste produto é conduzir soluções cristalóides para limpeza da cavidade cirúrgica para distender a cavidade e mantê-la lavada de sangue e corpos (partículas), com o sangramento controlado.

#### **Contraindicação**

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

#### **Modo de Uso:**

Retire o produto da embalagem utilizando técnica asséptica.

Segure o dispositivo pelo apoio do perfurador.

Retire a tampa protetora da ponta perfurante e insira no recipiente da solução.

Retire a tampa protetora pequena do irrigador.

Direcione o dispositivo para o local a ser irrigado.

Após o uso do produto, descartar de acordo com a legislação vigente.



**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163570050.

 <b>MEDSONDA</b> <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>	<b>Revisão Nº01</b>	<b>INSTRUÇÃO DE USO EQUIPO IRRIGADOR SISTEMA FECHADO IU 5.045</b>	<b>Emissão: 05/2025</b>	 <b>MEDSONDA</b> <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>
---	-------------------------	---	-----------------------------	---

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

<b>Data</b>	<b>Revisão</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alterações</b>
07/2021	00	Rogério S. Soares	Elaboração
05/2025	01	Rozilda R. Oliveira	Atualizações no Item Advertências e Precauções.