

	Revisão Nº05	INSTRUÇÃO DE USO DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO IU 5.017	Emissão: 09/2024	
--	-----------------	--	---------------------	--

Especificação Técnica:

Tamanhos G (50 a 54 cm) com comprimentos de 100 e 130 cm.
Conector com configuração cônica tipo macho de engate.
Conector com configuração cônica tipo fêmea de engate.
Preservativo (látex).
Estéril. Esterilizado a Óxido de Etileno. Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade, não utilizar se o prazo de validade estiver expirado.
Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, rasgos e sem presença de material estranho.
Contém Látex natural pode causar alergia.
Produto Estéril. Uso Único. Proibido Reprocessar. Proibido Reesterilizar.

Indicação de Uso:

Os dispositivos são indicados para serem usados em pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária e tem como única finalidade a coleta de urina.

Contraindicação:

Pacientes com alergia ao látex.

Modo de Uso:

Lavar as mãos;
Higienizar o pênis;
Verificar a integridade da embalagem do produto;
Abrir a embalagem e retirar o dispositivo assepticamente;
Colocar o dispositivo sobre a glândula, desenrolando delicadamente, de modo a ficar bem ajustado e sem folgas;
Conectar o tubo condutor ao recipiente coletor (não fornecido);
Recomenda-se a substituição do dispositivo a cada 12 horas;
Após o uso descartar em local apropriado.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570028.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Rogério S. Soares" para "Gessica Dias Correia". Inclusão de Contraindicações.
09/2024	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira" e Atualização no conteúdo.