

	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO BOLSA - 1500ml IU 5.060	Emissão: 10/2021	
---	-------------------------	--	-----------------------------	---

Especificação Técnica:

Tubo de PVC flexível azul (Tubo de drenagem).

Reservatório de 1500ml, com marcação de 25 em 25ml para o volume até 100ml, marcação de 100 em 100 ml para o volume de 100 a 1000ml e marcação de 500ml para graduação de 1000 a 1500ml.

Alça de sustentação.

Não Estéril. Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Conservar a embalagem em local limpo, seco e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra.

Antes do uso verificar a integridade do dispositivo, não deve haver rasgos, furos ou componentes danificados.

A escolha quanto ao uso do dispositivo deve ser feita pelo médico.

Produto Não Estéril. Não deve ser utilizado em procedimentos cirúrgicos.

A bolsa (reservatório) deve ser posicionada num nível inferior no leito em relação ao paciente, de modo que a urina seja coletada através da ação da gravidade, não havendo retorno para o paciente.

O produto deverá ser armazenado sob cuidados, longe da luz solar e não permanecer ao calor excessivo.

Deve ser descartado após o uso. Proibido Reprocessar;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada e perfurada.

O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Indicação de Uso:

O Coletor de Urina Sistema Aberto Tipo Bolsa é destinado para coleta de urina durante a sondagem uretral em sistema aberto. O dispositivo deverá ser utilizado em conexão com Sonda Uretral.

Contraindicação:

Não utilizar o dispositivo para coleta de urina através da sondagem uretral utilizando Sonda Foley.

Modo de Uso:

1. Retirar o produto da embalagem, utilizando técnica asséptica.
2. Antes do uso verificar a integridade do dispositivo, não deve haver rasgos, furos ou componentes soltos;
3. Certificar-se que os corta fluxos estão fechados;
4. Retirar a tampa de proteção do Conector Coldre e conectar na sonda uretral;
5. Fixar o reservatório através da alça de sustentação em local apropriado e abaixo do nível do paciente;
6. Abrir o corta fluxo do tubo de drenagem;
7. Assim que o reservatório estiver cheio, esvazie ou substitua o produto;
8. Para drenar, fechar o corta fluxo do tubo de drenagem, retirar a tampa de proteção e posicioná-lo ao recipiente que irá receber a urina;
9. Abrir o corta fluxo do tubo de drenagem inferior.
10. Após o esvaziamento fechar o corta fluxo e limpar o tubo de drenagem com antisséptico.
11. Abrir o corta fluxo do tubo extensor.
12. Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO BOLSA - 1500ml IU 5.060	Emissão: 10/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------	--	-----------------------------	---

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570047.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
10/2021	02	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogerio S. Soares”.