

Especificação Técnica:

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Tamanhos nos calibres: 04 ao 32 FR.

Comprimento: 120 cm.

4 orifícios laterais alternados, ponta fechada.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha quanto ao uso das sondas deve ser feita pelo médico;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado a uso médico hospitalar, usada para administrar medicamentos e alimentos diretamente no trato gastrointestinal; e para preparação pré-operatória que exigem repouso gástrico. É introduzida através da boca ou nariz até o estômago.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando a técnica asséptica durante o manuseio, introduzir a sonda conforme técnicas médicas até o ponto do esparadrapo, dobrar a extremidade da sonda antes de adaptar a seringa ou equipo de ar, conectar a sonda no equipo ou seringa e por ela introduzir o alimento vagarosamente, evitando que se esvazie, para evitar a entrada de ar, após a dieta, lavar a sonda com 20ml de água, afim de remover as partículas que nela ficarem aderidas. Fechar a sonda.

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570009.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
10/2021	03	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogério S. Soares”. Inclusão de Contraindicações.