
 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão N°03	INSTRUÇÃO DE USO - Sonda NASOGÁSTRICA IU 5.003	Emissão: 07/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	---	---------------------	---

Especificação Técnica:

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

Sonda Nasogástrica Curta:

Calibres: 04 ao 24 FR;

Comprimento: 40 cm;

4 orifícios laterais alternados, ponta fechada.

Sonda Nasogástrica Longa:

Calibres: 04 e 24 FR;

Comprimento: 110 cm;

4 orifícios laterais alternados, ponta aberta;

Exceção: Calibre 4FR possui a ponta fechada.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida;

O conector deve assegurar compatibilidade com equipos de nutrição e seringas.

Indicação de Uso:

Quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo, usada para administrar medicamentos e alimentos diretamente no trato gastrointestinal; e para fazer lavagens gástricas. É introduzida através da boca ou nariz até o estômago ou intestino. As sondas nasogástricas curtas são as sondas introduzidas até o estômago, e as nasogástricas longas são introduzidas até o trato intestinal. São conectadas a um equipo de nutrição, o qual é conectado ao frasco de alimentação ou as sondas podem ser conectadas a uma seringa. O tempo máximo de permanência das sondas é de 7 dias.



Contraindicação:

Contraindicado tempo de permanência das sondas superior a 7 dias.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando a técnica asséptica durante o manuseio, introduzir a sonda conforme técnicas médicas até o ponto do esparadrapo, dobrar a extremidade da sonda antes de adaptar a seringa ou equipo. Conectar a sonda no equipo ou seringa e por ela introduzir o alimento vagarosamente, evitando que se esvazie, para evitar a entrada de ar. Após a dieta, lavar a sonda com 20ml de água, a fim de remover as partículas que nela ficarem aderidas. Fechar a sonda.

Descartar o produto após o uso de acordo com a legislação vigente.

 MEDSONDA <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>	Revisão N°03	INSTRUÇÃO DE USO - SONDA NASOGÁSTRICA IU 5.003	Emissão: 07/2021	 MEDSONDA <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>
---	-------------------------	---	-----------------------------	---

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570003.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
07/2021	03	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogério S. Soares”. Especificação técnica: Inclusão do texto “Produto de uso único. Proibido Reprocessar”. Indicação de uso: inclusão do texto “O tempo máximo de permanência das sondas é de 7 dias.” Inclusão do item “Contraindicação” Modo de uso: inclusão do texto “Descartar o produto após o uso de acordo com a legislação vigente.”