
 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO SONDÁ URETRAL IU 5.001	Emissão: 07/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	---	---------------------	---

#### **Especificação Técnica:**

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Tamanhos nos calibres: 04 ao 24 FR.

Comprimento: 40 cm.

2 orifícios laterais, ponta fechada.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

#### **Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

#### **Advertências e Precauções:**

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico.

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria a ser utilizada.

Verificar o prazo de validade do produto antes de sua utilização. Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida.

#### **Indicação de Uso:**

A Sonda Uretral é utilizada para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. É uma sonda de alívio (uso transitório), tem como finalidade preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine de forma espontânea, após certas cirurgias; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina.

#### **Contraindicação:**

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

#### **Modo de Uso:**

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio, introduzir a sonda conforme técnicas médicas na bexiga, através do orifício externo da uretra e, esperar escoar a urina dentro da cuba rim e retirar a sonda conforme técnica.

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.



**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 Cep 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163570001.

 <b>MEDSONDA</b> <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>	<b>Revisão N°02</b>	<b>INSTRUÇÃO DE USO SONDÁ URETRAL IU 5.001</b>	<b>Emissão: 07/2021</b>	 <b>MEDSONDA</b> <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>
---	-------------------------	--	-----------------------------	---

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

<b>Data</b>	<b>Revisão</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alterações</b>
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
07/2021	02	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogério S. Soares”. Revisão dos itens para adequação conforme formulário de notificação na Anvisa.