

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO SONDA RETAL IU 5.004	Emissão: 07/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-----------------	---	---------------------	--

Especificação Técnica:

Policloreto de Vinila (PVC).

Tamanhos nos calibres: 04 ao 34 FR.

Comprimento: 40 cm.

1 orifício lateral, ponta aberta.

Estéril, Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de uso único. Proibido Reprocessar. Isento de Latex.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico.

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria a ser utilizada.

Verificar o prazo de validade do produto antes de sua utilização.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida.

Deve assegurar a compatibilidade de uso com seringas e irrigador.

Indicação de Uso:

Tem a finalidade de aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso, utilizável também para retirada de conteúdo fecal mediante enemas.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica.

Conectar a sonda retal no dispositivo de conexão.

Lubrificar a sonda retal.

Introduzir a sonda e realizar o procedimento conforme técnica médica.

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 Cep 84.990-000

Tel. (43) 3512-2800

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294

Registro Anvisa: 80163570004

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO SONDA RETAL IU 5.004	Emissão: 07/2021	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------	--	-----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
07/2021	02	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogério S. Soares”. Revisão dos itens para adequação conforme formulário de notificação na ANVISA.