

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO TAMPA LUER MED IU 5.013	Emissão: 10/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-----------------	--	---------------------	--

Especificação Técnica:

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

Indicação de Uso:

É indicado para vedar a via de acesso (entrada/saída) de extensões de equipos, seringas e cateteres que deixaram de receber a infusão de medicamentos, com isso, protege a entrada de microrganismos no corpo.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio;

Assim que terminar de utilizar as extensões de equipo, seringas e cateteres vedar a via de acesso com a tampa luer med;

Certifique-se do fechamento da via de acesso;

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570020.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
10/2021	02	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogério S. Soares". Inclusão de Contraindicações.