

Especificação Técnica:

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Estéril. Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de Uso único. Proibido Reprocessar.

Cateter Tipo Óculos:

Calibres: 08 e 10 FR;

Comprimento: 110 cm.

Cateter Nasal:

Calibres: 04 ao 20 FR;

Comprimento: 40 cm;

4 orifícios laterais, ponta fechada.

Cateter Nasal Neonatal:

Calibres: 06 FR;

Comprimento: 90 cm;

2 orifícios laterais, ponta fechada.

Cateter Nasal Infantil:

Calibres: 10 FR;

Comprimento: 90 cm;

2 orifícios laterais, ponta fechada.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria a ser usada;

Use sempre técnica asséptica quando for manusear o cateter;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

É utilizado o método da Oxigenoterapia: administração de oxigênio medicinal com finalidade terapêutica. O oxigênio pode ser administrado por intermédio de: Cateter Tipo Óculos, Cateter Nasal, Cateter Nasal Neonatal e Cateter Nasal Infantil. Cateter tipo óculos é empregado quando paciente requer uma concentração média ou baixa de oxigênio, e é introduzido através dos condutores nasais. Cateter nasal, Cateter Nasal Neonatal e Cateter Nasal Infantil, visa administrar concentrações baixas a moderada de oxigênio e é introduzido através da nasofaringe.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

MEDSONDA Produtos para saúde	Revisão N°04	INSTRUÇÃO DE USO CATETER PARA OXIGÊNIO IU 5.002	Emissão: 02/2022	MEDSONDA Produtos para saúde
--	-----------------	---	---------------------	--

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica, introduzir o cateter nasal conforme técnica médica;

O procedimento de Oxigenoterapia deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica; Medir, com o cateter tipo óculos, a distância entre a base do nariz e o lóbulo da orelha, introduzir o cateter pelo assoalho das narinas.

Já o Cateter Nasal, Cateter Nasal Neonatal e Cateter Nasal Infantil, introduzir em uma das narinas e observar a posição através da boca do paciente - o extremo do cateter deve aparecer atrás da úvula palatina, se ultrapassá-la, poderá ocorrer náuseas.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 Cep 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570002.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
04/2021	02	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogério S. Soares". Inserção do descritivo: Cateter Nasal Neonatal e Cateter Nasal Infantil,
07/2021	03	Rogério S. Soares	Alteração do comprimento do Cateter Tipo Óculos de 100 e 150 cm para 110cm.
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Rogério S. Soares" para "Gessica Dias Correia".