

**10322202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, INJ. LAT.,
CON. LUER SLIP
ANVISA Nº80163570006**

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp que se adaptem em conectores padrão de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:


1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Conector micro para redução do tamanho da gota.
4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
5. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
6. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
7. Injetor Lateral formato em Y com membrana auto cicatrizante para administração de soluções durante procedimento.
8. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1:2003 594-2:2003, montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
9. Tampa protetora para o conector luer slip.
10. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: ModelodeRótulo

EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: (43) 3512-2800 e-mail: sac@medsonda.com.br Resp: Técnico: Regiane Gavali CRO - PR 09071294	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTE PRODUTO É INDICADO SOMENTE PARA INFUSÃO POR GRAVITAÇÃO. ESTE PRODUTO É LÍQUIDO DE INOCUIDADE E INODORIDADE. PRODUTO DESTINADO SOMENTE PARA USO ÚNICO. FABRICADO EM PVC COM 150CM. ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR 8536-4:2011. 60 GOTAS DE SOLUÇÃO DESTILADA POR ML. VOLUME DE 150 ML. (150 ML. SU-150) MEDIDA DE 150 ML.	INSTRUÇÕES DE USO 1- ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR 2- FINALIDADE - ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE REQUEREM DE BAIXA PRESSÃO VOLUMÉTRICA. 3- COMPATÍVEL COM CONECTORES LUER, CONICIDADE 6%. 4- SEM A EXCLUSÃO DE FORMA HÍPOTÉTICA. 5- RETIRAR O REGULADOR DE FLUXO. 6- RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO. 7- MODELO US COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAMENTO. 8- REGULAR O FLUXO PRECISITO, INDICANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES UTILIZAR SOMENTE SE A BOMBAS ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONECTADOS. UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONECTADOS. PRODUTO DESTINADO, SE REPROCESSAMENTO PRECISO, USO ÚNICO. EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC COM 150CM NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA FORMULAÇÃO INULSÍVEIS.	CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.
VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br	
MODELOS COMERCIALIZADOS 10322202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL, E CONECTOR LUER SLIP 10322203 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322204 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS COM ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP 10322205 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10322206 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER ROTATIVO 10322207 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER ROTATIVO 10322208 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER ROTATIVO	
Validade 4 anos após a data de fabricação	

10322202 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. INJ. LAT. CONEC. LUER SLIP 150CM
LOTE OP:00000 FAB/ESTÉRIL 00/16
ANVISA Nº 80163570006

7898487862944

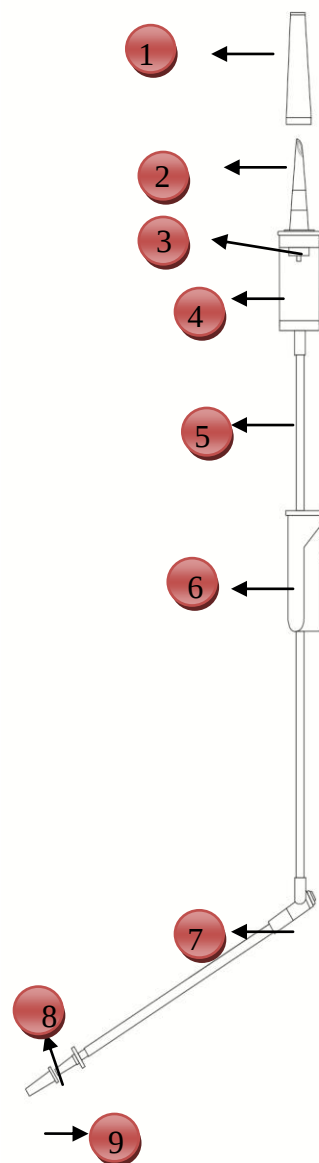

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	04	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	05	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	06	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.