

**10322202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, INJ. LAT., CON.
LUER SLIP
ANVISA Nº80163570006**

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp's que se adaptem em conectores conforme NBR ISO 80369-7:2022.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536 - 4:2024 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Conector micro para redução do tamanho da gota.
4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
5. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
6. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
7. Injetor Lateral formato em Y com membrana auto cicatrizante para administração de soluções durante procedimento.
8. Conector luer slip conforme NBR ISO 80369-7:2022.
9. Tampa protetora para o conector luer slip.
10. **FREE LÁTEX**

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

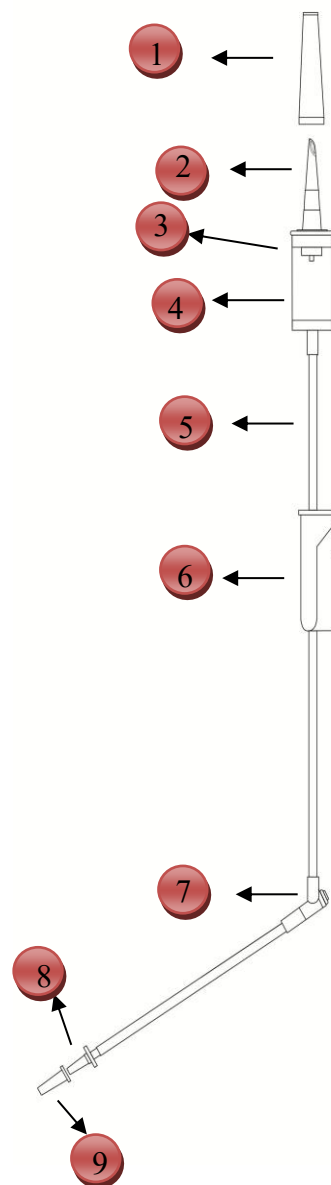

EQUIPO MICROGOTAS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL G FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO : MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: 43 3512 2800 sac@medsonda.com.br Resp. Técnico: Regiane Gavlik CRQ - PR 09201284	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - COMPRIMENTO: 150CM. - ESTE PRODUTO É UM LIVRE DE PROIBIÇÕES; - AT 200C; - ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15008-2:2004. - 80 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1CM³ (1ML) OU MASSA DE 1(1)g. - COMPATIVEL COM CONEXÃO LUER AINT NBR 15008-2.	INSTRUÇÕES DE USO 1 - FINALIDADE : ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE NECESSITE DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA; 2 - AVERIGUAR A ENXERGIA DE FORMA ASSEPTICA; 3 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO; 4 - RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO; 5 - MODELOS COM INJETOR LATERAL PODEM SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO; 6 - REGULAR O FLUXO PRECISAMENTE, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGAGEM ESTIVER INTEGRAL E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS - PRODUTO É DE ARRISCADO, SE REPROCESSAMENTO É PROIBIDO. USO ÚNICO. - EQUIPOS PRODUTOS EM PVC COMODOPÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA FORMULAÇÃO FÁRMACOS.	CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.
MODELOS COMERCIALIZADOS 1032202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 1032202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 1032252 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS COM ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP 10317021 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10317002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL CONECTOR LUER ROTATIVO 10318002 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROTATIVO 10318003 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP	
ANVISA Nº 80163570006 NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR STERILE MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE VALIDADE 4 anos após a data de fabricação CONTÉM 1 UNIDADE INDÚSTRIA BRASILEIRA	

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:			
Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	05	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	06	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47.1 – Requisitos de Rotulagem.