


**10322232 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR E CON. LUER SLIP
E CON. LUER SLIP
ANVISA N°80163570006****FINALIDADE:**

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp que se adaptem em conectores conforme NBR 80369-7:2022.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
 2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2024 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
 3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
 4. Conector micro, para redução do tamanho da gota.
 5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
 6. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
 7. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
 8. Conector luer slip conforme NBR ISO 80369-7:2022.
 9. Tampa protetora para o conector luer slip.
10. **FREE LÁTEX**

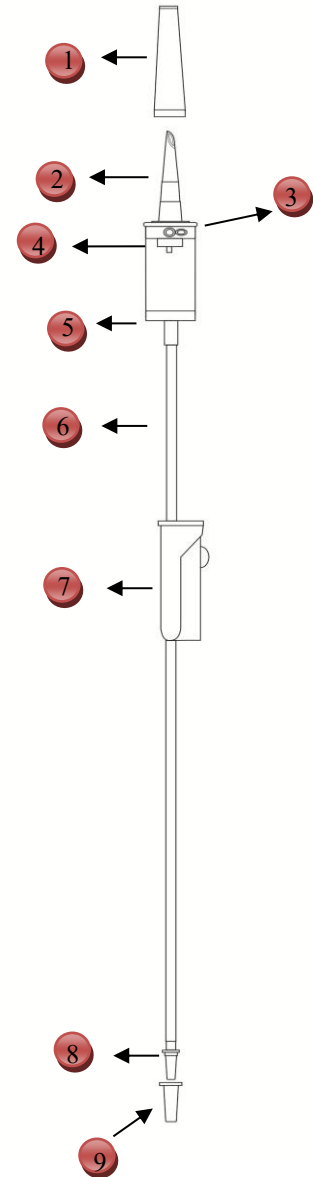

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação;

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

EMBALAGEM:

↑ ABRIR ↑

EQUIPO MICROGOTAS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL G

FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO : MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 | DISTRITO INDUSTRIAL | CEP: 84990-000 | ARAPOTI - PR | CNPJ: 05.150.338/0001-43 | IE: 9026874405
FONE: 43 3512 2800 | sac@medsonda.com.br | Resp. Técnico: Regiane Gavlak | CRQ - PR 09201294

<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMPRIMENTO: 192CM. - ESTE PRODUTO ESTÁ LIVRE DE PIROGÊNICOS; - AZÚCARO; - ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR ISO 8536-4:2024. - 10 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO REGULADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1 (UM) ML, OU MASSAGEM (1x10) 10. - COMPATÍVEL COM CONEXÃO LUER ABNT NBR ISO 80395-7. 	<p>INSTRUÇÕES DE USO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- FINALIDADE : ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE REQUERISSE DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA; 2- ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASSÉPTICA; 3- FECHAR O REGULADOR DE FLUXO; 4- RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFORANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO; 5- MODELOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO; 6- REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
<p>ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM ÍNTEGRAMENTE CONECTADOS; - PRODUTO DE USO ANTI-REFLUXO, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO; - EQUIPOS PRODUZIDOS EM PAÍSES COM O PAÍS DE ORIGEM SEREM UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA FORMULAÇÃO PACTEXEL. 	<p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO</p> <p>MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.</p>
<p>MODELOS COMERCIALIZADOS</p> <p>10322202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10322102 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322232 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS COM ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP 10317021 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10317002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL CONECTOR LUER ROTATIVO 10318002 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROTATIVO 10318003 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP</p>	

Saúde

Compulsório

ANVISA Nº 80163570006

STERILE **MEDSONDA**

PRODUTOS PARA SAÚDE

Validade 4 anos após a data de fabricação

CONTÉM 1 UNIDADE

INDÚSTRIA BRASILEIRA

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	05	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	06	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.