

**10317021 – EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS
ENTRADA DE AR, INJ. LAT. E CON. LUER SLIP
ANVISA N°80163570006****FINALIDADE:**

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalpns que se adaptem em conectores conforme NBR ISO 80369-7:2022.

COMPOSIÇÃO:

- 1.Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2024 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
6. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
7. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
8. Injetor Lateral formato em Y com membrana auto-cicatrizante para administração de soluções durante procedimento.
9. Conector luer slip conforme NBR ISO 80369-7:2022.
10. Tampa protetora para o conector luer slip.
11. **FREE LÁTEX**

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:


Código ;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação;
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso e Revisão;
Código de barras.
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos

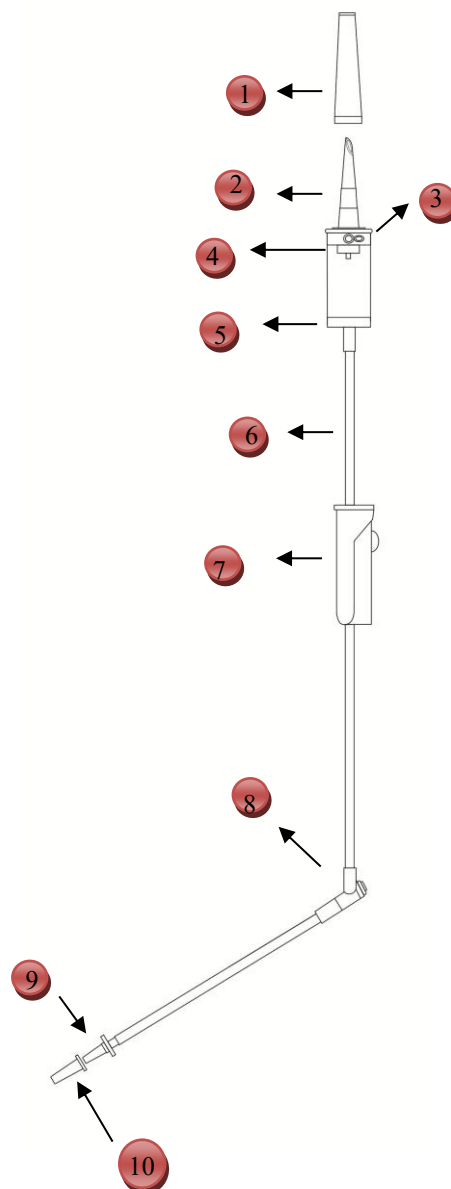

EMBALAGEM:

↑ ABRIR ↑

EQUIPO MICROGOTAS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL G

FABRICANTE/DETECTOR DA NOTIFICAÇÃO : MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 | DISTRITO INDUSTRIAL | CEP: 84990-000 | ARAPOITI - PR | CNPJ: 05.150.338/0001-43 | IE: 9026874405
FONE: 43 3512 2800 | sac@medsonda.com.br | Resp. Técnica: Regiane Gavlak | CRQ - PR 09201284

<p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>- COMPRIMENTO: 103CM. - ESTE PRODUTO ESTÁ LIVRE DE PIROGÊNICOS; - ATÓXICO; - ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR ISO 8038-4:2004. - 40 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1 (UM) ML. DA MASSA DE 0,1 (0,1) g; - COMPATÍVEL COM CONEXÃO LUER ABNT NBR ISO 80395-7.</p>	<p style="text-align: center;">INSTRUÇÕES DE USO</p> <p>1 - FINALIDADE : ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE REQUERITE DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA; 2 - ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASSÉPTICA; 3 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO; 4 - RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFORANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO; 5 - MODELOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUZIR MEDICAÇÃO; 6 - REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.</p>
<p style="text-align: center;">ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</p> <p>- UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM ÍNTEGRAMENTE CONECTADOS; - PRODUTO DE USO ÚNICO, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO; - EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC, COM OPÇÃO DE SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA FORMULAÇÃO: FACILITAVEL.</p>	<p style="text-align: center;">CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO</p> <p>MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.</p>

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES EM: WWW.MEDSONDA.COM.BR

MODELOS COMERCIALIZADOS
1032202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP
1032202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP
1032202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS COM ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP
10317021 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP
10317002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL CONECTOR LUER ROTATIVO
10318003 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP
10318003 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP

Saúde

NÃO REESTERILIZAR
PROIBIDO REPROCESSAR

STERILE EQ MEDSONDA

PRODUTOS PARA SAÚDE

Validade 4 anos após a data de fabricação

CONTÉM 1 UNIDADE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	04	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	05	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	06	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.