

**10317002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENTR.AR, INJETOR LATERAL E CON. LUER ROTATIVO
ANVISA Nº 80163570006**

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp's que se adaptem em conectores de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.


COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas, modelo tri-facetado.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
6. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
7. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
8. Injetor lateral formato em y, com membrana auto-cicatrizante para administração de soluções durante procedimento.
9. Conector luer lock rotativo, conforme NBR ISO 594-1 e 2/2003, montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
10. Tampa protetora para ao conector luer rotativo.
11. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo

EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
<p>MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84.990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.100.338/0001-43 IE: 9028674405 FONE: (43) 3512-2800 sac@medsonda.com.br www.medsonda.com.br</p>	
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>ESTE PRODUTO É DESTINADO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL, PARA A ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CATETERES E SCALP'S QUE SE ADAPTEM EM CONECTORES DE CONICIDADE 6% CONF. NBR 594:2003 1 E 2.</p> <p>RECEITA DE AVALIAÇÃO: AVALIAÇÃO REALIZADA POR EQUIPO DE QUALIDADE DE 15/04/2022.</p>	<p>INSTRUÇÕES DE USO</p> <p>1. ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR</p> <p>2. FINALIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE REQUEREM DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA.</p> <p>3. COMPONENTES: CONECTOR MICRO, CONECTOR LATERAL, CONECTOR LUER, PINÇA COM ROLETE, CÁMARA DE GOTEJAMENTO, TUBO EM PVC, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER ROTATIVO.</p> <p>4. FECHAR O REGULADOR DE FLUXO.</p> <p>5. RETIRAR A TAMPA PROTETORA DO CONECTOR PERFORANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO.</p> <p>6. Ajustar a taxa de gotejamento conforme necessidade.</p> <p>7. REGULAR O FLUXO PRESSIONAL, INDICANDO O DETERMINADO DE SOLUÇÃO.</p>
<p>ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</p> <p>UTILIZAR SOMENTE SE A SINALIZAÇÃO ESTIVER INTACTA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.</p> <p>EVITAR O USO DE FORÇA EXCESSIVA NA MANUSEIO DO EQUIPO, PARA EVITAR DANOS À MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE.</p> <p>EVITAR O USO DE FORÇA EXCESSIVA NA MANUSEIO DO EQUIPO, PARA EVITAR DANOS À MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE.</p>	<p>VER INSTRUÇÕES DE USO</p> <p>www.medsonda.com.br</p>
<p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO</p> <p>GUARDAR EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.</p>	<p>MODELOS COMERCIALIZADOS</p> <p>10317002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP.</p> <p>10317003 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP.</p> <p>10317004 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP.</p> <p>10317005 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP.</p> <p>10317006 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP.</p> <p>10317007 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP.</p> <p>10317008 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP.</p> <p>10317009 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP.</p> <p>10317010 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP.</p>
<p>Saúde</p> <p>Computório</p> <p>USO ÚNICO NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR</p> <p>STERILIZADO MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE</p> <p>Validade 4 anos após a data de fabricação</p>	

**COD: 10317002 – EQUIPO MICRO FLEX. FILTRO
PART., ENT. AR, INJ. LAT., CONEC. LUER
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570006**

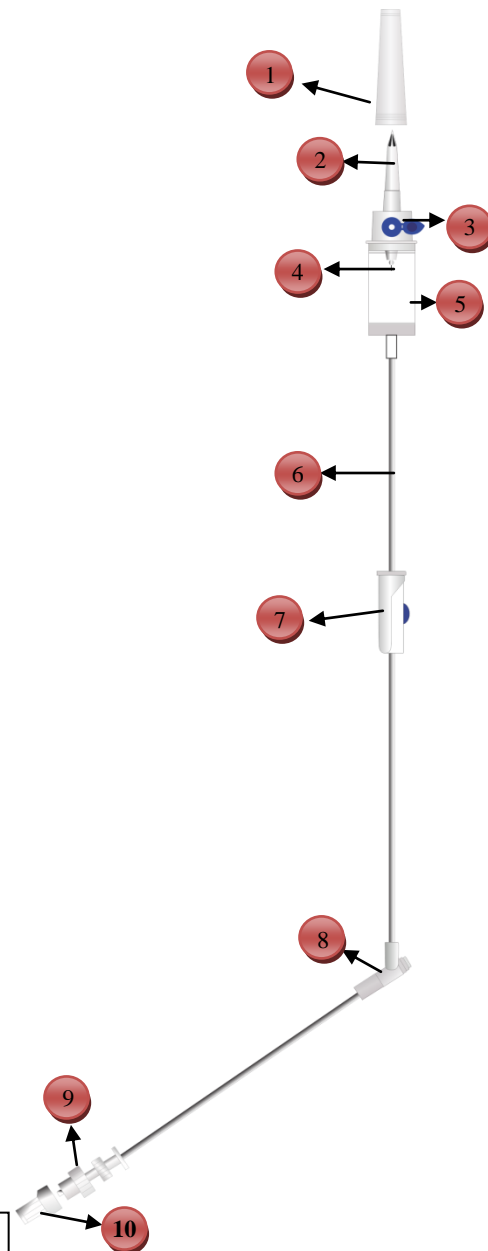

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	05	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2021	06	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogério S. Soares". Inclusão da especificação ponta perfurante tri-facetada Alteração do perfurador de frasco imagem 2.
02/02/2022	07	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Rogério S. Soares" para "Gessica Dias Correia".