

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº04	INSTRUÇÃO DE USO MEDVIAS IU 5.025	Emissão: 09/2024	 PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-----------------	---	---------------------	--

Especificação Técnica:

Policloreto de Vinila (PVC). Atóxico.

Comprimento: 15 e 20 cm.

Diâmetro: 8FR e 12FR.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento:

Manter em local seco, limpo, ao abrigo do sol.

Condições de Transporte:

No transporte tomar as devidas precauções, tais como, não jogar, não amassar, não rasgar, não perfurar.

Manter o produto em local limpo, seco e ao abrigo do sol.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso dos produtos devem ser feitas pelo médico;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; a embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada e úmida.

Os Medvias com conector luer valvulado devem ser utilizados somente com dispositivos médicos que apresentem conexão luer lock com rosca.

O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado a uso médico hospitalar, tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, conectando as vias de infusão (equipos, extensores, seringas) ao acesso venoso (scalp, cateter). Indicado para infusão simultânea de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais e dispositivos médicos que se adaptem em conectores conforme a ABNT NBR ISO 80369-7.

Contraindicação:

Os Medvias são produzidos em PVC com DOP e não devem ser utilizados com medicamentos que contenham em sua formulação Paclitaxel (substância contida em alguns medicamentos de uso oncológico), pois a solução concentrada ou diluída em contato com o material plástico de PVC ocasiona o desprendimento do plastificante.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio.

Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem.

Verificar se as conexões e componentes do produto suportam as condições normais de uso.

Certificar-se de que não há ocorrências de bolhas de ar durante a passagem da solução.

Realizar a punção no paciente com scalp ou cateter e conectar o medvias.

Conectar a outra extremidade do medvias aos dispositivos de infusão.

Após o uso, descartar de acordo com a legislação vigente.

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº04	INSTRUÇÃO DE USO MEDVIAS IU 5.025	Emissão: 09/2024	 PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------	--	-----------------------------	--

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570041.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
01/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de Rogério S. Soares para "Gessica Dias Correia". Alteração de informações de "Advertências e Precauções".
09/2024	04	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira" e Atualização de Norma.