

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº03	INSTRUÇÃO DE USO EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL IU 5.015	Emissão: 10/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	--	---------------------	---

Especificação Técnica:

Composição:

Tubo de PVC

Conector de PVC

Tampa do conector de PVC

Câmara de PVC

Comprimento: 120, 150, 200 cm. Diâmetro: 12 FR

Produto Estéril.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto estéril e de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

Produto de uso médico hospitalar.

Usado para administrar alimentos líquidos ou semilíquidos até o estômago ou intestino delgado do paciente.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

A escolha quanto ao uso dos produtos deve ser feita pelo médico.

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

Abrir a embalagem e retirar o equipo usando técnicas assépticas.

Remover a tampa de proteção da câmara de gotejamento.

Puncionar o frasco para nutrição enteral.

Preencher a câmara de gotejamento pressionando e soltando até que seja preenchido 1/3 de sua capacidade.

Colocar o frasco de nutrição enteral em um nível acima, a fim de facilitar o preenchimento do equipo.

Remover a tampa protetora do conector.

Proceder com a nutrição.

Recolocar o protetor.

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570026.

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº03	INSTRUÇÃO DE USO EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL IU 5.015	Emissão: 10/2021	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-----------------	---	----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
10/2021	03	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogério S. Soares”. Inclusão de Contraindicações.