

|                                                                                                         |                 |                                                  |                     |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PRODUTOS PARA SAÚDE | Revisão<br>Nº02 | INSTRUÇÃO DE USO<br>ESPÉCULO VAGINAL<br>IU 5.026 | Emissão:<br>10/2021 | <br>PRODUTOS PARA SAÚDE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Especificação Técnica:

Poliestireno Cristal rígido.

Tamanhos: P, M e G.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Uso Único. Proibido Reprocessar.

#### Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

#### Advertências e Precauções:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

#### Indicação de Uso:

Tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas, facilitando a visualização do colo uterino no exame ginecológico e obstétrico; e durante a coleta de material para o exame preventivo.

#### Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e as instruções de uso.

#### Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio;

O procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica.

Fazer a introdução pelo canal vaginal conforme técnicas médicas.

Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163579002.

#### CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

| Data    | Revisão | Responsável         | Alterações                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/2019 | 01      | Milena Costa Rivera | Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".                                                                                                                            |
| 10/2021 | 02      | Rogério S. Soares   | Especificação técnica: Inclusão do texto "Produto de uso único. Proibido Reprocessar".<br>Inclusão do item "Contraindicação".<br>Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogerio S. Soares". |