

Revisão N°03

# INSTRUÇÃO DE USO ESPÉCULO VAGINAL IU 5.026

Emissão: 02/2022



## Especificação Técnica:

Poliestireno Cristal rígido.

Tamanhos: P, M e G.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Uso Único. Proibido Reprocessar.

# Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

### Advertências e Precauções:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

## Indicação de Uso:

Tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas, facilitando a visualização do colo uterino no exame ginecológico e obstétrico; e durante a coleta de material para o exame preventivo.

### Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e as instruções de uso.

#### Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio;

O procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica.

Fazer a introdução pelo canal vaginal conforme técnicas médicas.

Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.

(43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163579002.

# CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

| Data    | Revisão | Responsável         | Alterações  |
|---------|---------|---------------------|---|
| 10/2019 | 01      | Milena Costa Rivera | Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma  |
|         |         |                     | Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".             |
| 10/2021 | 02      | Rogério S. Soares   | Especificação técnica: Inclusão do texto "Produto de uso  |
|         |         |                     | único. Proibido Reprocessar".                             |
|         |         |                     | Inclusão do item "Contraindicação".                       |
|         |         |                     | Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena  |
|         |         |                     | Costa Rivera" para "Rogerio S. Soares".                   |
| 02/2022 | 03      | Gessica Dias        | Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Rogerio |
|         |         | Correia             | S. Soares" para "Gessica Dias Correia".                   |