
 MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº03	INSTRUÇÃO DE USO EXTENSOR CRISTAL PARA ASPIRAÇÃO IU 5.037	Emissão: 11/2025	 MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-------------------------	--	-----------------------------	---

Especificação Técnica:

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Calibre: 16FR, 18FR, 20FR e 22FR

Comprimento: 150; 200; 300; 400 e 600cm.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso dos extensores devem ser feitas pelo médico.

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

Produto de Uso Único. Proibido Reprocessar.

O reuso deste produto poderá ocasionar:

- efeitos biológicos adversos decorrentes de resíduos de produtos, microrganismos e/ou substâncias decorrentes de usos anteriores e/ou do reprocessamento;
- alterações das características físicas originais do produto que podem prejudicar a sua funcionalidade pretendida.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

É indicado para aspiração cirúrgica em procedimentos médicos.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio.

Examine o produto antes de utilizá-lo, o produto não pode apresentar cortes, furos, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Conecte as extremidades adaptadoras aos dispositivos de conexão.

Após o uso, descartar o dispositivo de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570045.

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº03	INSTRUÇÃO DE USO EXTENSOR CRISTAL PARA ASPIRAÇÃO IU 5.037	Emissão: 11/2025	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------	--	-----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
10/2021	02	Rogério S. Soares	Especificações técnicas - inclusão do calibre. Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogério S. Soares”. Inclusão de Contraindicações.
11/2025	03	Rozilda R. Oliveira	Atualização conforme cadastro Anvisa.