

	Revisão Nº04	INSTRUÇÃO DE USO EXTENSOR PARA CATETER DE INFUSÃO IU 5.027	Emissão: 09/2024	
--	-----------------	--	---------------------	--

Especificação Técnica (Composição):

Tubo de Policloreto de Vinila (PVC) atóxico e transparente.

Comprimento: 20, 40, 60, 80 e 120 cm.

Diâmetro: 6FR; 8FR; 10FR e 12FR.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso dos produtos devem ser feitas pelo médico (profissional habilitado);

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não pode ser reutilizado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; a embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada e úmida. O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Conectores valvulados devem atender as técnicas de limpeza apropriada para utilização.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado a uso médico hospitalar, é usado como intermediário para infusão de soluções parenterais, quando o suporte da solução fica longe do paciente. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais e dispositivos médicos que se adaptem em conectores conforme a ABNT NBR ISO 80369-7.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e as instruções de uso.

Modo de Uso:

A escolha e as orientações quanto ao uso dos extensores devem ser feitas pelo médico;

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio;

Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem.

Verificar se as conexões e componentes do produto suportam as condições normais de uso.

Conectar as extremidades do extensor.

O conector Luer macho e fêmea deve compartilhar compatibilidade com equipos de infusão, cateteres, torneiras, seringas, e com scalp (jelco).

Se o extensor apresenta corta fluxo verificar se o mesmo permite uma regulagem do fluxo de gotejamento da solução entre zero e o máximo.

Se o extensor for valvulado utilizar da técnica de limpeza asséptica antes das utilizações.

Certificar-se de que não há ocorrências de bolhas de ar durante a passagem da solução.

Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº04	INSTRUÇÃO DE USO EXTENSOR PARA CATETER DE INFUSÃO IU 5.027	Emissão: 09/2024	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	--	---------------------	---

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163579003.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2021	03	Rogério S. Soares	Especificação técnica: Inclusão do texto "Produto de uso único. Proibido Reprocessar". Inclusão do item "Contraindicação". Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogerio S. Soares".
09/2024	04	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome do Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira" e Atualização de norma.