

**COLETOR URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1.200ML NÃO ESTÉRIL
ANVISA Nº80163570008****FINALIDADE:**

Sistema de coleta de urina, indicada para coleta de urina durante uma sondagem uretral.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora.
2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alívio, demora. O conector deste produto foi desenvolvido para receber em sua parte interna sonda de alívio e em sua parte externa sonda de demora, não sendo necessário uso de adaptações de látex.
3. Tubo de extensor em PVC atóxico com 100 cm de comprimento.
4. Alça de PVC resistente para fácil adaptação ao leito do paciente.
5. Pinça corta fluxo, para retenção da passagem de fluidos.
6. Conector em PVC para ser conectado ao frasco com facilidade e segurança. Possibilitando uma drenagem segura e rápida do frasco coletor.
7. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 1200 ml. Confeccionado em Polipropileno inodoro e resistente.
8. Escala volumétrica em alto relevo para medições da diurese.
9. **FREE LÁTEX**

Em embalagem primária constam os seguintes dados do produto:

Código;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação;
Cadastro ANVISA;
Código de barras.

EMBALAGEM


Embalado individualmente em saco plástica.

ESTERILIZAÇÃO


Produto não estéril.

VALIDADE

Validade 4 anos.

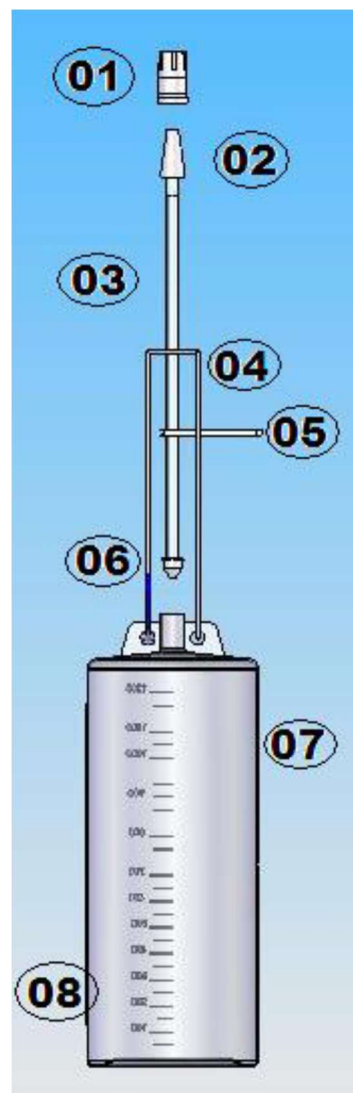

MODELO DE EMBALAGEM:

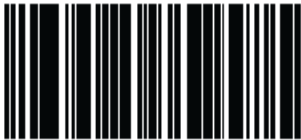Lote: Fab: MEDSONDA Produtos para saúde 10501011- COLETOR SISTEMA ABERTO GARRAFA 1.200ML Ñ ESTÉRIL	
CONTEÚDO 1-Frasco com capacidade de 1.200ml graduado de 50 em 50ml; 2-Alça plástica para manipulação e sustentação; 3-Tubo de drenagem; 4-Corta fluxo tipo clamp; 5-Conector e tampa.	ADVERTÊNCIAS -Após o uso descartar conforme legislação vigente; -Produto não-estéril; -Produto de uso único; -Proibido reprocessar; -Verificar o prazo de validade do produto, antes de sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado; -O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.
INSTRUÇÕES DE USO 1 -Abrir a embalagem; 2 - Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica; 3-Assim que o reservatório estiver cheio, esvazie ou substitua o produto; 4-Para esvaziar o reservatório, feche o tubo com o corta fluxo e proceda com o esvaziamento.	Proibido Reprocessar PRECAUÇÕES -Utilizar o produto somente se todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas e sem presença de material estranho. -A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada e úmida.
VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br	CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO -Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.
CONTÉM 1 UNIDADE	PRODUTO VÁLIDO POR 4 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO
 7898487861930	ANVISA Nº 80163570008
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Descartáveis LTDA Av. Thereza de Souza Carneiro, 1191 Distrito Industrial Araçatuba - PR CEP 84.990-000 CNPJ: 05.150.338/0001-43 Fone: (43)3512 2800 www.medsonda.com.br sac@medsonda.com.br RESP. TÉCNICA : Regiane Gavlak CRQ-PR 09201294 INDÚSTRIA BRASILEIRA	

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº04	FICHA TÉCNICA FT 8.055	Emissão 04/2025	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2019	02	Milena Costa Rivera	Exclusão do sistema de Incontinência urinária
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	04	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.