

	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO SISTEMA ABERTO PARA COLETA DE URINA NÃO ESTÉRIL IU 5.036	Emissão: 10/2021	
--	-----------------	--	---------------------	--

Especificação Técnica:

Tubo de PVC flexível azul (Tubo de drenagem).

Conector bucha (Retentor de gotejamento no reservatório).

Conector macho e fêmea em PVC azul (fixação do preservativo no tubo extensor).

Preservativo Látex (coleta de urina peniana).

Corta fluxo tipo Clamp PP - Polipropileno (obstrução de coleta da urina).

Alça Plástica PVC azul (manipulação e fixação do dispositivo).

Garrafa de 1200 ml PP (Reservatório) com graduação de 50 em 50ml e marcação de 100 em 100ml.

Não Estéril. Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra.

Antes do uso verificar a integridade do dispositivo, não deve haver rasgos, furos ou componentes danificados.

A escolha quanto ao uso do dispositivo deve ser feita pelo médico.

O produto deverá ser armazenado sob cuidados, longe da luz solar e não permanecer ao calor excessivo.

Produto Não Estéril. Deve ser descartado após o uso. Proibido Reprocessar;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada e úmida;

O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Contém látex, pode causar alergia.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado a uso médico hospitalar para a coleta e armazenamento de urina.

Contraindicação:

Não apresenta contraindicações quando utilizado para a finalidade que se destina, seguindo suas instruções de uso.

Modo de Uso:

Retirar o produto da embalagem, utilizando técnica asséptica.

- . Antes do uso verificar a integridade do dispositivo, não deve haver rasgos, furos ou componentes soltos;
- . Aplicar o preservativo no paciente ou conectar na sonda uretral;
- . Assim que o reservatório estiver cheio, esvazie ou substitua o produto;
- . Para esvaziar o reservatório, feche o tubo com o corta fluxo e proceda o esvaziamento;
- . Após esvaziar, abra o corta fluxo para que o líquido possa correr normalmente;
- . Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570043.

	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO SISTEMA ABERTO PARA COLETA DE URINA NÃO ESTÉRIL IU 5.036	Emissão: 10/2021	
--	-----------------	--	----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
10/2021	02	Rogério S. Soares	Especificação técnica: Inclusão do texto “Não Estéril. Uso único. Proibido Reprocessar”. Inclusão do item “Contraindicação”. Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogerio S. Soares”.