

	Revisão Nº03	INSTRUÇÃO DE USO - SISTEMA ABERTO PARA COLETA DE SECREÇÕES GÁSTRICAS E URINA NÃO ESTÉRIL IU 5.007	Emissão: 10/2021	
--	-----------------	--	---------------------	--

Especificação Técnica:

Tubo de PVC flexível.

Conector com configuração cônica e tampa.

Conector para conexão entre o reservatório e o tubo.

Corta fluxo.

Reservatório de 1200 ml.

Produto Não estéril.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto não estéril e de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não pode ser reutilizado.

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado a uso médico hospitalar, utilizado para a coleta de secreções gástricas durante o processo de lavagem gástrico ou durante o tempo que o paciente fique com uma sonda nasogástrica; e usado também para coletar e armazenamento de urina em pacientes que se manterem com sonda uretral.

Modo de Uso:

A escolha quanto ao uso dos dispositivos deve ser feita pelo médico.

Retirar o produto da embalagem.

Conectar a sonda.

Assim que o reservatório estiver cheio, esvazie e/ou substitua o produto.

Feche o tubo com o corta fluxo e proceda com o esvaziamento.

Após esvaziar, abra o corta fluxo para que o líquido possa correr normalmente.

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570008.

 MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº03	INSTRUÇÃO DE USO - SISTEMA ABERTO PARA COLETA DE SECREÇÕES GÁSTRICAS E URINA NÃO ESTÉRIL IU 5.007	Emissão: 10/2021	 MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------	--	-----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
10/2021	03	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogério S. Soares”. Inclusão de Contraindicações.