

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO PRENDEDOR UMBILICAL IU 5.011	Emissão: 10/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	---	---------------------	---

Especificação Técnica:

Plástico PEBD de cor branca.

Comprimento: 10cm de comprimento e 2 cm de largura.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada e úmida;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Indicação de Uso:

É utilizado para fechar o cordão umbilical de recém-nascido, após o parto.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

Retirar o produto de sua embalagem no momento do uso;

Colocar o cordão umbilical na posição central do prendedor deixando distante 2 cm aproximadamente do recém-nascido e fechar até travar;

Cortar o cordão umbilical 1 cm acima do prendedor e certificar que não ocorre sangramento pelo cordão;

Após o período de uso descartar de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570015.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
10/2021	02	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogério S. Soares". Inclusão de Contraindicações.