

**10315002 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENT. AR, CON. LUER SLIP
ANVISA Nº80163570006**

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.


COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Ponta perfurante confeccionada conforme NBR ISO 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
5. Tubo em PVC atóxico com luz interna superior a 2.7mm.
6. Pinça com rolete para controle do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
7. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1/2003 montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
8. Protetor para a porta agulha (Tampa Luer Slip)
9. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: 43 3512 2800 sac@medsonda.com.br RESP. TÉCNICA: REGIANE GAVILAN CRC: - PR 05021094 www.medsonda.com.br	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRODUTO COMPOSTO DE PVC - POLICLORETO DE VINILA - COMPRIMENTO MÍNIMO 1.00MM - LIVRE DE PIROGÊNICO E TORINAS - ATÓXICO - FABRICADO CONFORME ABNT NBR 8364 - 2011 - 20 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1.0 ML OU MASSA DE 1.0 G	INSTRUÇÕES DE USO 1 - ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR 2 - FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL 3 - COMPATÍVEL COM CONECTORES LUER, CONICIDADE 6% 4 - ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASSÉPTICA 5 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO 6 - RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO PRATO DE SOLUÇÃO 7 - MODELOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO 8 - REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS - PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO - EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC COM OP NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTEÑHAM EM SUA FORMULAÇÃO FÁRMACOS	CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO - MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E EQUIPACIÃO ASSÉPTICA
MODELOS COMERCIALIZADOS 10315002 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER ROTATIVO 10315003 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315004 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315005 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315006 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315007 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315008 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315009 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315010 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP	
VER INSTRUÇÕES DE USO - VER INSTRUÇÕES DE USO	
Validade 4 anos após a data de fabricação	

**COD: 10315002 – EQUIPO MACRO FLEX. FILTRO
PART. ENT. AR, CONEC. LUER SLIP
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570006**

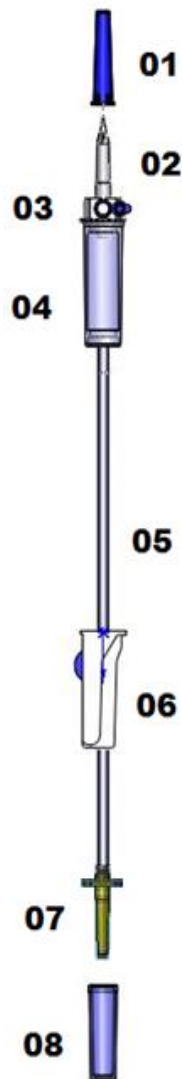

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

	Revisão Nº05	FICHA TÉCNICA FT 8.047	Emissão 02/2022	
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	04	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	05	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".