

10318003 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENTR.AR, INJETOR LATERAL VALVULADO E CON. LUER SLIP ANVISA N°80163570006**FINALIDADE:**

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalps que se adaptem em conectores conforme NBR 80369-7:2022.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2024 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada
6. Filtro particulado de 15 micras.
7. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
8. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
9. Injetor lateral formato em y, com membrana auto-vedante para administração de soluções durante procedimento.
10. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
11. Conector luer slip conforme NBR ISO 80369-7:2022.
12. Tampa protetora para conector luer slip.
13. **FREE LÁTEX**

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação;

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

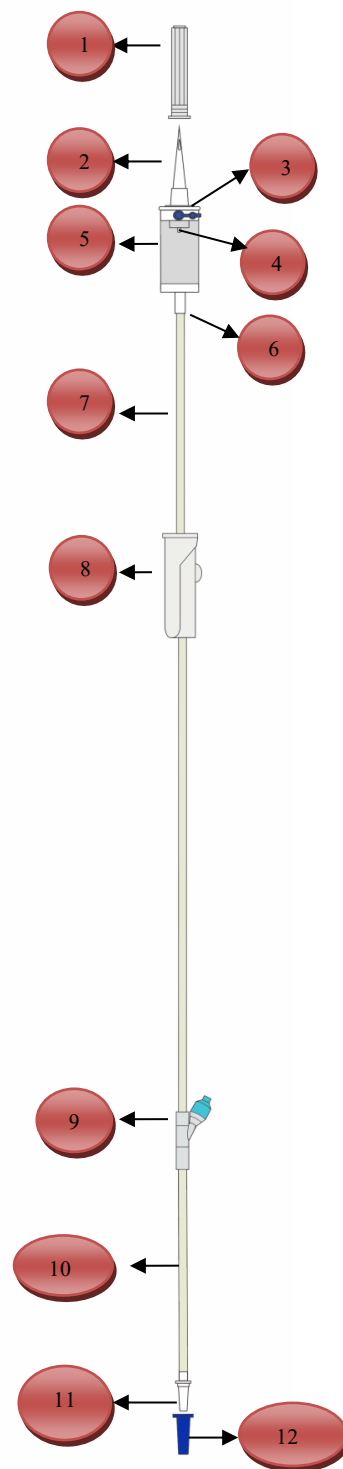



EMBALAGEM:

ABRIR

EQUIPO MICROGOTAS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL G

FABRICANTE/DETECTOR DA NOTIFICAÇÃO : MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 | DISTRITO INDUSTRIAL | CEP: 84990-000 | ARAPOITI - PR | CNPJ: 05.150.338/0001-43 | IE: 9026874405
FONE: 43 3512 2800 | sac@medsonda.com.br | Resp. Técnico: Regiane Gavliak | CRQ - PR 09201294

<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>- COMPRIMENTO: 193CM - ESTE PRODUTO ESTÁ LIVRE DE PIROGÊNIOS; - 2000ML; - ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR ISO 9001-2004; - 20 GORNI DE ÁGUA DESEINFECTADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE (1+0,1)ML, OU MASSA DE (1+0,1)g; - COMPATÍVEL COM CONECTOR LUER ABNT NBR ISO 80369-7.</p>	<p>INSTRUÇÕES DE USO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - FINALIDADE : ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL QUE NECESSITE DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA; 2 - ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASSÉPTICA; 3 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO; 4 - RETIRAR A TAMPA PROTETORA DA PONTA PERFORANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO; 5 - MODELOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO; 6 - REGULAR O FLUXO PRESORTO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
<p>ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</p> <p>- UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS - PRODUTO DEICAPÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO; - EQUIPOS PRODUTOS EM PVC, COMPOZICÃO TEM SEM UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA FORMULAÇÃO PCL, BAGEEL.</p>	<p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO</p> <p>MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.</p>
<p>MODELOS COMERCIALIZADOS</p> <p>10322002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10322102 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS COM ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP 10317021 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10317002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL CONECTOR LUER ROTATIVO 10318002 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROTATIVO 10318003 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Saúde</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR</p> <p>STERILE EO MEDSONDA</p> <p>PRODUTOS PARA SAÚDE</p> <p>Validade 4 anos após a data de fabricação</p> <p>CONTÉM 1 UNIDADE</p> <p>INDÚSTRIA BRASILEIRA</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2019	02	Milena C. Rivera	Item 9. Alteração da palavra auto-cicatrizante para auto-vedante
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	04	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.