

10318002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENTR.AR, INJETOR LATERAL VALVULADO E CON. LUER ROTATIVO ANVISA N°80163570006**FINALIDADE:**

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalpns que se adaptem em conectores conforme NBR ISO 80369-7:2022.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2024 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
6. Filtro particulado de 15 micras.
7. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
8. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
9. Injetor lateral valvulado, com membrana auto-vedante para administração de soluções durante procedimento.
10. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
11. Conector luer lock rotativo, conforme NBR ISO 80369-7:2022
12. Tampa protetora para a conector luer rotativo.
13. **FREE LÁTEX**

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

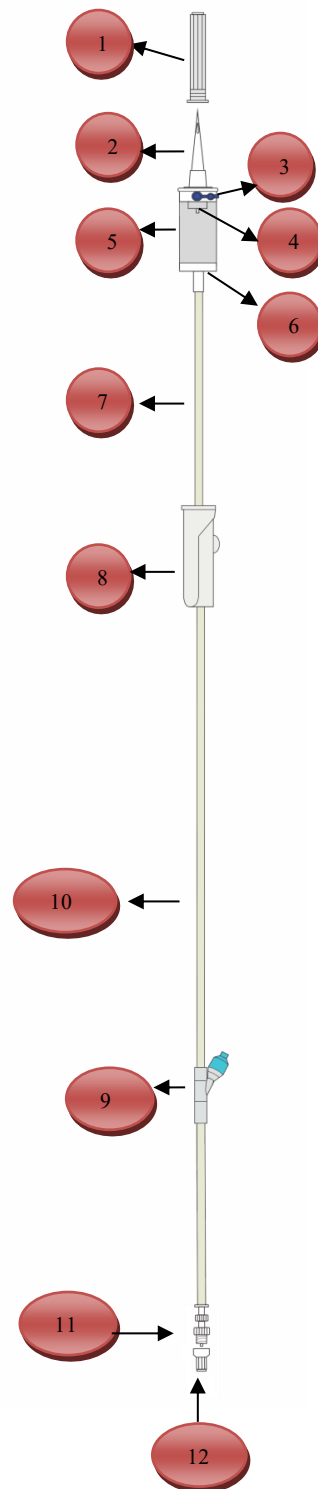

EMBALAGEM:

ABRIR ↑

EQUIPO MICROGOTAS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL G

FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO : MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 | DISTRITO INDUSTRIAL | CEP: 84990-000 | ARAPOTI - PR | CNPJ: 05.150.338/0001-43 | IE: 9026874405
FONE: 43 3512 2800 | sac@medsonda.com.br | Resp. Técnico: Regiane Gavlak | CRQ - PR 09201284

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- COMPRIMENTO: 100CM.
- ESTE PRODUTO É LIVRE DE PIROGÊNICOS.
- AFÉRCIO.
- ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR ISO 8036-4:2004.
- 50 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTELADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1 (UM) ML DE MASSA DE 1 (UM) g.
- COMPATÍVEL COM CONEXÃO LUER ABNT NBR ISO 80395-7.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- USAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.
- USAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM ÍNTEGRAMENTE CONSERVADOS.
- PRODUTO DE ÚSO ÚNICO. REPROCESSAMENTO É PROIBIDO. USO ÚNICO.
- EQUIPOS PROCELOSOS EM PICO COM PICO NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTEÑHAM EM SUA FORMULAÇÃO PÓCULO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - FINALIDADE : ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL QUE REQUISITE DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA;
- 2 - ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASSÉPTICA;
- 3 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO;
- 4 - RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFORANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO;
- 5 - MODELOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO;
- 6 - REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTELAMENTO DE SOLUÇÃO.

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTIVER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES EM: WWW.MEDSONDA.COM.BR

MODELOS COMERCIALIZADOS

1032202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP
1032202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS E CONECTOR LUER SLIP

1032282 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS COM ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP
1031701 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP
1031702 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTICULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL CONECTOR LUER ROTATIVO
1031802 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INL. LAT. VALV. CON. LUER ROTATIVO
1031803 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INL. LAT. VALV. CON. LUER SLIP

Compulsório

ANVISA Nº 80163570006

NÃO REESTERILIZAR
PROIBIDO REPROCESSAR

STERILE EO MEDSONDA

PRODUTOS PARA SAÚDE

Validade 4 anos após a data de fabricação

CONTÉM 1 UNIDADE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

CONTROLE DE ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2019	02	Milena C. Rivera	Item 9. Alteração da palavra auto-cicatrizante para auto-vedante.
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	04	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.