

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº03	INSTRUÇÃO DE USO PINÇA DE CHERON IU 5.030	Emissão: 02/2022	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	------------------------	--	----------------------------	--

Especificação Técnica:

Poliestireno.

Comprimento: 25 cm.

Estéril. Esterilizado a Óxido de Etileno. Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

Indicação de Uso:

É indicado para auxiliar na assepsia nos exames ginecológicos, bem na assepsia vaginal, como nos curativos no colo uterino.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e as instruções de uso.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio;

O procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;

Sob visão direta, mãos enluvasadas, espéculo introduzido e aberto na vagina, com gaze ou algodão preso.

Pressão na extremidade serrilhada e embebida com solução de medicamentos ou antissépticos, com movimentos circulares ou de vai e vem.

Excursionar a pinça de Cheron sobre a mucosa a ser tratada.

Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163579007.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
10/2021	02	Rogério S. Soares	Especificação técnica: Inclusão do texto "Produto de uso único. Proibido Reprocessar". Inclusão do item "Contraindicação".
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Rogério S. Soares" para "Gessica Dias Correia".

Atualizado por Gessica Dias Correia – Aprovado por Regiane Gavlak – Data da Aprovação 02/2022