
 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL IU 5.035	Emissão: 10/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	---	---------------------	---

Especificação Técnica:

Frasco de Nutrição Enteral 300 ml e 500ml
Graduação de 100 em 100 ml em auto-relevo.
Confeccionado em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD).
Não Estéril. Uso único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local limpo, seco e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto não estéril e de uso único; descartável após uso e de reprocessamento proibido, não pode ser reutilizado.

Somente utilizar o produto se estiver íntegro e dentro do prazo de validade;

Não utilizar o produto se o lacre da tampa estiver rompido;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada ou úmida.

Indicação de Uso:

Os frascos de nutrição enteral são artigos médico hospitalares destinados ao acondicionamento de nutrição enteral para ser administrado por sonda ou via oral.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

- O produto deve ser aplicado e supervisionado por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas para este tipo de produto;
- Retirar o produto da embalagem;
- Retirar a tampa do frasco;
- Colocar a dieta a ser administrada;
- Fechar bem o frasco;
- Conectar o equipo na tampa do frasco.

Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.



Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570036.

 MEDSONDA <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL IU 5.035	Emissão: 10/2021	 MEDSONDA <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>
---	-------------------------	---	-----------------------------	---

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
10/2021	02	Rogério S. Soares	Especificação técnica: Inclusão do texto "Uso único. Proibido Reprocessar". Inclusão do item "Contraindicação". Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogerio S. Soares".