
 MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão N°02	INSTRUÇÃO DE USO COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO DESCARTÁVEL MEDSONDA IU 5.018	Emissão: 10/2021	 MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-----------------	--	---------------------	--

Especificação Técnica:

Polietileno virgem especial.

Fita adesiva antialérgica.

Capacidade: 100 ml.

Diâmetros: 30; 50; 63 mm.

Produto Não Estéril.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto não estéril e de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

Produto de uso médico hospitalar.

É usado como coletor de urina em pacientes com sonda de demora, e em crianças podendo ser meninos ou meninas.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

A escolha quanto ao uso dos produtos deve ser feita pelo médico.

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

Retirar o produto da embalagem.

Fixe o produto ao corpo a través da fita adesiva antialérgica ou introduzir no coletor a sonda de demora para coleta do material.

Terminada a coleta, retire o coletor do paciente e se necessário for, substitua por outra.

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.



Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570029

 MEDSONDA <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO DESCARTÁVEL MEDSONDA IU 5.018	Emissão: 10/2021	 MEDSONDA <small>PRODUTOS PARA SAÚDE</small>
--	-------------------------	---	-----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
10/2021	02	Rogerio S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Rogerio S. Soares”. Inclusão de Contraindicações.