

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº01	INSTRUÇÃO DE USO TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK IU 5.043	Emissão: 10/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	---	---------------------	---

Especificação Técnica:

Polipropileno e Policarbonato

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

Indicação de Uso:

A Torneira 3 Vias é um dispositivo para conectar e regular a direção do fluxo de soluções intravenosas de três linhas distintas, duas linhas de infusão (equipo, extensor) e uma de acesso venoso (scalp, cateter) com conexão macho.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

Usar técnica asséptica para conexão da torneira ao sistema de infusão;

Abrir a embalagem e retirar a torneira;

Retirar a tampa do conector macho Luer lock e conectar a torneira ao dispositivo (scalp ou cateter);

Fechar a torneira direcionando a seta da válvula para fora do fluxo de infusão;

Retirar a tampa de um dos conectores fêmea e conectar a um dos dispositivos de infusão;

Abrir a torneira direcionando a seta da válvula para o fluxo de infusão;

Repetir as etapas 5 e 6 para conectar outro dispositivo de infusão;

Fechar a torneira, retirar o dispositivo de infusão e colocar a tampa no conector;

Fechar a torneira, retirar do scalp ou cateter e colocar a tampa no conector;

Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163579005.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
07/2020	00	Milena Costa Rivera	Elaboração
10/2021	01	Rogério S. Soares	Inclusão do item "Contraindicação". Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogerio S. Soares".