

**DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO****Especificação Técnica:**

Tubo de PVC de 100 e 130 cm de comprimento.  
Conector com configuração cônica tipo macho de engate.  
Conector com configuração cônica tipo fêmea de engate.  
Preservativo (látex).  
Tamanhos: G (equivale ao tamanho 7 com diâmetro 52 mm).

**Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

**Advertências e Precauções:**

Produto estéril de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.  
Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado.  
Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.  
A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.  
Produto de uso médico hospitalar, estéril, apirogênico e atóxico.

**Indicação de Uso:**

Para pacientes com incontinência urinária. É indicado para transporte de urina e secreções uretrais até a bolsa coletora.

**Modo de Uso:**

A escolha em quanto ao uso dos dispositivos deve ser feita pelo médico.  
Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.  
Retirar o produto da embalagem de forma asséptica.  
Envolver o pênis com o preservativo.  
Conectar o tubo na bolsa coletora.  
Assim que a bolsa estiver cheia, substitua o dispositivo.  
Após o uso, descartar em lugar apropriado.

**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163570028.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração
07/2017	01	Joelma C. Brizola	Alterado o tamanho do preservativo
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".