

**SONDA URETRAL****Especificação Técnica:**

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Tamanhos nos calibres: 04 ao 24 FR.

Comprimento: 40 cm.

2 orifícios laterais, ponta fechada.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

**Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

**Advertências e Precauções:**

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

**Indicação de Uso:**

A sonda uretral é utilizada para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. É uma sonda de alívio (permanência curta), tem como finalidade: preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine de forma espontânea; após certas cirurgias; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina.

**Modo de Uso:**

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio, introduzir a sonda conforme técnicas médicas na bexiga, através do orifício externo da uretra e, esperar escoar a urina dentro da cuba rim e retirar a sonda conforme técnica.

**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 Cep 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163570001.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".