

SONDA RETAL**Especificação Técnica:**

Policloreto de Vinila (PVC).

Tamanhos nos calibres: 04 ao 34 FR

Comprimento: 40 cm

1 orifícios lateral, ponta aberta.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco e limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico;

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria a ser utilizada.

Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

Verificar o prazo de validade do produto antes de sua utilização.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho;

Deve assegurar a compatibilidade de uso com seringas e irrigador;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

Tem a finalidade de aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso, utilizável também para retirada de conteúdo fecal mediante enemas. O tempo de permanência da sonda no paciente não deve exceder o limite de 6 horas.

Modo de Uso:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica.

Conectar a sonda retal no irrigador.

Colocar a solução laxativa dentro do irrigador.

Lubrificar a sonda retal.

Introduzir a sonda conforme técnica médica.

Retirar o ar da sonda sobre a cuba rim.

Clampar a extensão do irrigador.

Após a introdução da sonda desclampar a extensão do irrigador.

Escoar lentamente o líquido até restar pequena quantidade no irrigador.

Clampar a extensão, retirar a sonda e desprezar na cuba rim.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 Cep 84.990-000

Tel.(43) 3512-2800

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294

Registro Anvisa: 80163570004

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".