

CATETER PARA OXIGÊNIO**Especificação Técnica:**

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Tamanhos nos calibres: 08 e 10 FR (Cateter Tipo Óculos).

Comprimento: 08 - 100 cm, 10 - 150 cm.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

Tamanhos nos calibres: 04 ao 20 FR (Cateter Nasal).

Comprimento: 40 cm.

4 orifícios laterais, ponta fechada.

Tamanhos nos calibres: 06 FR (Cateter Nasal Neonatal).

Comprimento: 90 cm.

2 orifícios laterais, ponta fechada.

Tamanhos nos calibres: 10 FR (Cateter Nasal Infantil).

Comprimento: 90 cm.

2 orifícios laterais, ponta fechada.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria a ser usada;

Use sempre técnica asséptica quando for manusear o cateter;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

É utilizado o método da Oxigenoterapia: administração de oxigênio medicinal com finalidade terapêutica. O oxigênio pode ser administrado por intermédio de: Cateter Tipo Óculos, Cateter Nasal, Cateter Nasal Neonatal e Cateter Nasal Infantil. Cateter tipo óculos é empregado quando paciente requer uma concentração média ou baixa de oxigênio, e é introduzido através dos condutores nasais. Cateter nasal, Cateter Nasal Neonatal e Cateter Nasal Infantil, visa administrar concentrações baixas a moderada de oxigênio e é introduzido através da nasofaringe.

Modo de Uso:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica, introduzir o cateter nasal conforme técnica médica;

O procedimento de Oxigenoterapia deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;

Medir, com o cateter tipo óculos, a distância entre a base do nariz e o lóbulo da orelha, introduzir o cateter pelo assoalho das narinas.

Já o Cateter Nasal, Cateter Nasal Neonatal e Cateter Nasal Infantil, introduzir em uma das narinas e observar a posição através da boca do paciente - o extremo do cateter deve aparecer atrás da úvula palatina, se ultrapassá-la, poderá ocorrer náuseas.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 Cep 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570002.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
04/2021	02	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera". Inserção do descritivo: Cateter Nasal Neonatal e Cateter Nasal Infantil,