

EQUIPO ADAPTADOR TRANSFERIDOR SISTEMA FECHADO**Especificação Técnica:**

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Tamanho no calibre: 14 FR.

Comprimentos: 10 cm.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso dos equipos devem ser feitas pelo médico;

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

Transferir e misturar soluções parenterais em sistema fechado, medicamentos no interior de bolsas e frascos.

Modo de Uso:

A escolha quanto ao uso dos produtos deve ser feita por profissional habilitado.

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica.

Conectar ambos extremos do transferidor às bolsas ou frascos que se deseja transferir as soluções e proceder á transferência.

Descartar após uso.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570027.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração
06/2017	01	Joelma C. Brizola	Atualização do calibre do tubo
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
11/2020	03	Milena Costa Rivera	Exclusão dos comprimentos 20, 40, 60, 80, 100 e 120 cm.

