


**10312102 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS,
CON. LUER SLIP
ANVISA N°80163570006**

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalps que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Protetor para ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
4. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
5. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
6. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1 e 2 :2003 montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
7. Protetor para conector luer slip.
8. FREE LÁTEX

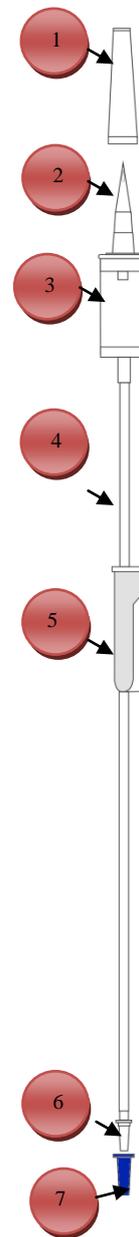

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo

<p>EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: (43)3512-2800 sac@medsonda.com.br RESP. TÉCNICA: REGIANE GAVLAK CRQ - PR 09201294 www.medsonda.com.br</p>	
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> PRODUTO COMPOSTO DE PVC - POLICLORETO DE VINILA; COMPRIMENTO MÍNIMO: 150CM; LIVRE DE PROTOGÊNICOS E TOXINAS; FABRICAÇÃO CONFORME ABNT NBR 8536-4: 2011; 20 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 145µl DE MASSA DE 1ml. 	<p>INSTRUÇÕES DE USO</p> <ol style="list-style-type: none"> ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL. COMPATIVEL COM CONEXÕES LUER, CONICIDADE 6%; ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASSÉPTICA; FECHAR O REGULADOR DE FLUXO; RETRAIR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO; MODELOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO; REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
<p>ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM ÍNTEGRAMENTE CONSERVADOS. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO. EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC COM DSP NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA EMBALAGEM ÁCIDO ACETILSALENIL. 	<p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO</p> <p>MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE</p>
<p>MODELOS COMERCIALIZADOS</p> <p>10312102 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER ROTATIVO</p> <p>10312103 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP</p> <p>10312104 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP</p> <p>10312102 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP</p> <p>10312102 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP</p> <p>10317001 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROT.</p> <p>10317003 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP.</p>	<p>VER INSTRUÇÕES DE USO</p> <p>www.medsonda.com.br</p>
<p>Saúde</p> <p>Compulsório</p> <p>USO ÚNICO NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR</p> <p>STERILE</p> <p>MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE</p> <p>Validade 4 anos após a data de fabricação</p>	

**COD: 10312102 – EQUIPO MACRO FLEX. FILTRO
PART. CONEC. LUER SLIP
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA N° 80163570006**



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
01/2018	02	Joelma C. Brizola	Revisão da embalagem
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex