

10312202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, INJ. LAT, CON.LUER SLIP
ANVISA Nº80163570006

FINALIDADE:


Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalpels que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 14041/96 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
4. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
5. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
6. Injetor Lateral em Y com membrana auto-cicatrizante para administração de soluções em procedimento.
7. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
8. Protetor luer slip.
9. Conector Luer Slip conforme NBR ISO 594-1/2003 montagem cônica com conexidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
10. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84.990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9028874405 FONE: 43 3512-2800 sac@medsonda.com.br RESP. TÉCNICA: REGIANE GAVIÃO CRO - PR 09201294 www.medsonda.com.br	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRODUTO COMPOSTO DE PVC, POLIOLEFINO DE VINILA, COMPARTIMENTO UNICO, TUBO, ALÇA DE MANEIO E INJETOR LATERAL. AMBIADO CONFORME ABNT NBR 9034 - 2011. 20 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADA PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1 ML NA TEMPERATURA AMBIENTE. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL E SEM SINAIS DE FALHA. UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS. PRODUTO DESCARTÁVEL, NÃO REPROCESSAMENTO PREVISÃO: 160 ANOS. EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC COM DOP NAO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTEÑAM EM SUA COMPOSIÇÃO DOP (DOP). CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTE-LO EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.	INSTRUÇÕES DE USO 1- ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR. 2- FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL. 3- COMPATÍVEL COM CONECTORES LUER, CONEXIDADE 6%. 4- ABRA A EMBALAGEM DE FORMA ASEPTICA. 5- PRECISE O REGULADOR DE FLUXO. 6- RETIRAR A TAMPA PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO. 7- MANEIO COM INJETOR LATERAL, PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO. 8- REGULAR O FLUXO PRECISITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO. VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br
MODELOS COMERCIALIZADOS 10312202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER ROTATIVO 10312203 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10312204 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10312205 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10312206 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10312207 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10312208 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10312209 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10312210 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP	
Saúde Compulsório USO ÚNICO NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR STERILE MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE Validade 4 anos após a data de fabricação	

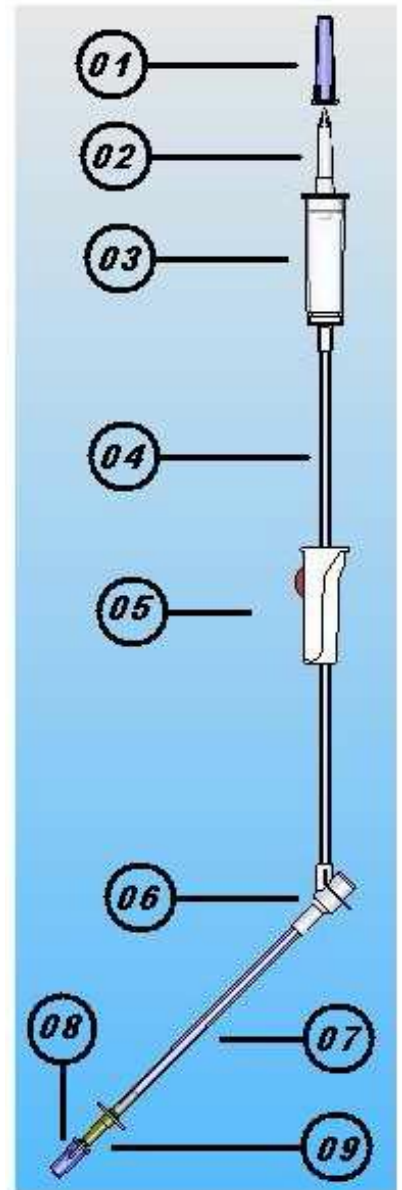

COD: 10312202 – EQUIPO MACRO FLEX. FILTRO
PART. INJ. LAT, CONEC. LUER SLIP
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570006



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
01/2018	02	Joelma C. Brizola	Revisão da embalagem
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex