

**10315202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PART., ENT. AR, INJ.
 LAT, CON. LUER SLIP
 ANVISA Nº80163570006**

FINALIDADE:


Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalps que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado 15 micras e entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
5. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
6. Injetor Lateral em Y com membrana auto cicatrizante para administração de soluções em procedimento.
7. Porta agulha conforme NBR ISO 594-1/2003 montagem cônica com conexidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
8. Tampa protetora para a porta agulha.
9. FREE LÁTEX

ROTULAGEM:Modelo de Rotulo

EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: 43 3512 2800 sac@medsonda.com.br RESP. TÉCNICA: REGIANE GAVLAK CRQ - PR 09201294 www.medsonda.com.br	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRODUTO COMPOSTO DE PVC - POLÍGLOTO DE VINIL - COMPRIMENTO MÍNIMO 150CM - LUZ DE PROTEÇÃO E TOMBADA - ARTIGO - FABRICADO CONFORME ABNT (ISO 8536-4:2011) - 20 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1 ML (1:20)	INSTRUÇÕES DE USO 1- ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR 2- FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL 3- COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER, CONEXIDADE 6% 4- ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASEPTICA 5- FECHAR O REGULADOR DE FLUXO 6- RETIRAR A TAMPA PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO 7- MODELOS COM INJETOR LATERAL, PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUZIR MEDICAÇÃO 8- REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER INTACTA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS - PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO - EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC COM DOP NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTEÑHAM EM SUA COMBINAÇÃO INULOSANES	CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE
VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br	MODELOS COMERCIALIZADOS 10315202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULADO ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER ROTATIVO 10315203 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULADO ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315204 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULADO ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP 10315205 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULADO INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315206 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULADO E CONECTOR LUER SLIP 10315207 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROT. 10315208 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP
Saúde Compulsório	USO ÚNICO NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR STERILE
Validade 4 anos após a data de fabricação	

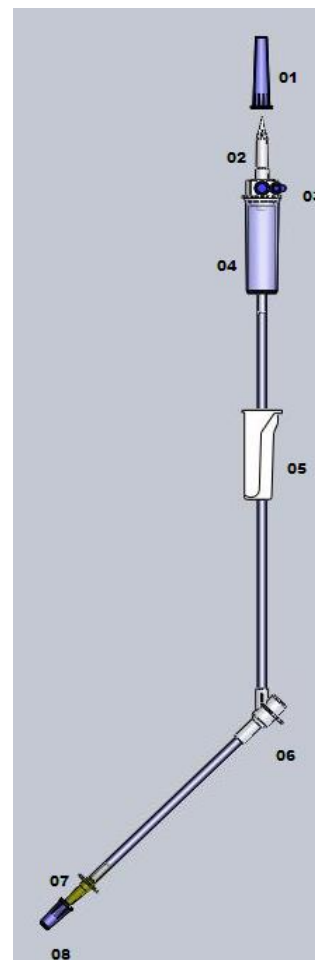

**COD: 10315202 – EQUIPO MACRO FLEX. FILTRO
 PART., ENT. AR, INJ. LAT., CONEC. LUER SLIP
 LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
 ANVISA Nº 80163570006**


EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Alteração da validade 4 anos
01/2018	02	Joelma C. Brizola	Revisão embalagem
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex