

10322102 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, CON. LUER SLIP
ANVISA Nº80163570006

FINALIDADE:


Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalpys que se adaptem em conectores padrão de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador com conector micro, confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Conector micro para redução do tamanho da gota.
4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
5. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
6. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
7. Conector luer slip, conforme NBR ISO 594-1 e 2/2003 montagem cônica conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
8. Tampa protetora para a conector luer slip.
9. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: ModelodeRotulo

EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84.990-000 ARAPOITI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9025874405 FONE: 43 3512 2800 sac@medsonda.com.br	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTE PRODUTO É INDICADO SOMENTE PARA USO HOSPITALAR. ESTE PRODUTO ESTÁ LIVRE DE PIRENOGENOS E ENDOTOXINAS. PRODUTO DESTINADO SOMENTE PARA USO ÚNICO. FABRICADO EM PVC COM 1500MM. 400MM DE DIÂMETRO E 100MM DE ALTURA. - 100 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 10 ML DE SOLUÇÃO DE 1 ML/100. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM ÍNTEGRAMENTE CONSTITUÍDOS. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO. EQUIPO PRODUZIDO EM PVC COM OPI NÃO DEVER SER UTILIZADO COM MEDICAMENTOS QUE CONTEÑHAM EM SUA COMPOSIÇÃO SUBSTÂNCIAS.	INSTRUÇÕES DE USO 1 - ANTES DO USO, VERIFICAR A DATA DE VALIDADE. 2 - FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE REQUER NECESSIDADE DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA. 3 - COMPATÍVEL COM CONECTORES LUER, CONICIDADE 6%. 4 - ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASÉPTICA. 5 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO. 6 - RETIRAR A TAMPA PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO. 7 - MODELOS COM INJETOR LATERAL, PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO. 8 - REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO. VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br
CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.	MODELOS COMERCIALIZADOS 10322102 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10322103 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10311021 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10311022 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP 10311023 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP 10311024 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP 10311025 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP 10311026 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP 10311027 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP 10311028 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP 10311029 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP 10311030 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP
Saúde Compulsório	USO ÚNICO NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR STERILE MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE Validade 4 anos após a data de fabricação

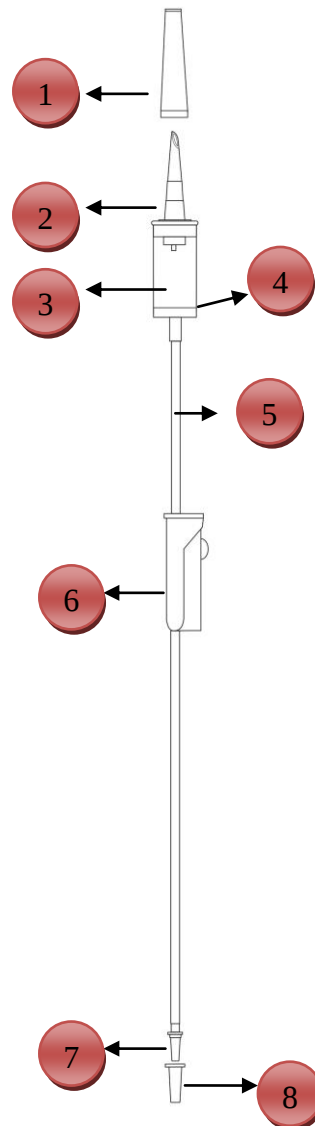

COD: 10322102 – EQUIPO MICRO FLEX. FILTRO
PART. ,CON. LUER SLIP
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570006



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
08/2016	01	Joelma C. Brizola	Atualização
03/2017	02	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
01/2018	03	Joelma C. Brizola	Revisão embalagem
08/2018	04	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex