


10322232 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR E CON. LUER SLIP ANVISA N°80163570006

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp's que se adaptem em conectores padrão com conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro, para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
6. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
7. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
8. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1:2003 e 594-2:2003 para seringas e agulhas.
9. Tampa protetora para o conector luer slip.
10. FREE LÁTEX

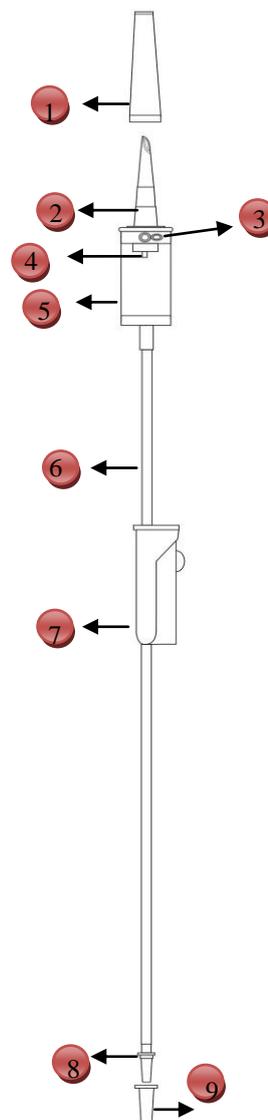

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

<p>EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9028874405 FONE: (43) 3512-2800 sac@medsonda.com.br</p>	
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SEU PRODUTO É MEDICADO SOBRE E PARA USO ÚNICO PARA GRAVIDADE; - ESTE PRODUTO É DA LINHA DE PRODUTOS E EXERCÍTIOS; - PRODUTO DESTINADO SOMENTE PARA USO ÚNICO; - FABRICADO EM PVC COM 150MM DE COMPRIMENTO; - ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR ISO 9004:2011; - O VOLUME DE SOLUÇÃO DESTA LINHA MEDSONDA PODE SER EQUIVALENTE A UM VOLUME DE 150ML DE SOLUÇÃO DE 150ML.</p>	<p>INSTRUÇÕES DE USO 1- ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR; 2- FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE REQUEREM DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA; 3- COMPATÍVEL COM CONECTORES LUER, CONICIDADE 6%; 4- ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASEPTICA; 5- PICHAR O REGULADOR DE FLUXO; 6- RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO; 7- MODELO COM INJETOR LATERAL, PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO; 8- REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.</p>
<p>ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONDIÇÃO; - PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO; - EQUIPO PRODUZIDO EM PVC COM COP, NÃO DEVER SER UTILIZADO COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUAS FORMULAÇÕES ANTIBIÓTICOS.</p>	<p>VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br</p>
<p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE</p>	
<p>MODELOS COMERCIALIZADOS 10322232 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10321402 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP 10322232 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS COM ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP 10317101 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10317102 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP ROTATIVO 10318803 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP ROTATIVO 10318805 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP</p>	
<p>USO ÚNICO NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR</p>	
<p>STERILE EQ MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE</p>	
<p>Validade 4 anos após a data de fabricação</p>	
<p>10322232 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR CONEC. LUER SLIP 150 CM LOTE OP:00000 FAB/ESTÉRIL 00/16 ANVISA N° 80163570006</p>	
<p>7898487864078</p>	

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
08/2016	01	Joelma C. Brizola	Atualização
03/2017	02	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
01/2018	03	Joelma C. Brizola	Revisão embalagem
08/2018	04	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex