

10317021 – EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS
ENTRADA DE AR, INJ. LAT. E CON. LUER SLIP
ANVISA Nº80163570006

FINALIDADE:


Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp que se adaptem em conectores padrão com conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
6. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
7. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
8. Injetor Lateral formato em Y com membrana auto-cicatrizante para administração de soluções durante procedimento.
9. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1:2003 e 594-2:2003 para seringas e agulhas.
10. Tampa protetora para o conector luer slip.

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: 43.3512.2800 sac@medsonda.com.br	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ESTE PRODUTO É INDICADO SOMENTE PARA INFUSÃO POR GRAVIDADE; - ESTE PRODUTO É LIVRE DE PRECISÕES E ENDOTÓXICAS; - PRODUTO DESTINADO SOMENTE PARA USO ÚNICO; - FABRICADO EM PVC COM 150MM; - Filtro de 15 micras; - ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR ISO 8034:2011; - 80 DPM DE AGUA DESTILADA LIBERADA PELO DIFUSOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1,115.186 DL (MILILITROS).	INSTRUÇÕES DE USO 1 - ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR 2 - FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE REQUERESSE DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA; 3 - COMPATÍVEL COM CONECTORES LUER, CONICIDADE 6%; 4 - ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASSÉPTICA; 5 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO; 6 - RETIRAR A TAMPA PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO; 7 - MODELOS COM INJETOR LATERAL, PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO; 8 - REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL E SEMPRE DO PRAZO DE VALIDADE; - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS; - PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO; - EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC COM DOP NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS ALCALIZANTES.	VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.	MODELOS COMERCIALIZADOS 1032202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 1032203 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10317021 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10317002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER ROTATIVO 10318002 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. INJ. CON. LUER ROTATIVO 10318003 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. INJ. CON. LUER SLIP
Saúde Compulsório ANVISA	USO ÚNICO NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR STERILE
Validade 4 anos após a data de fabricação	
10317021- EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. CONEC LUER SLIP 150CM LOTE OP:00000 FAB/ESTÉRIL 00/16 ANVISA Nº 80163570006	

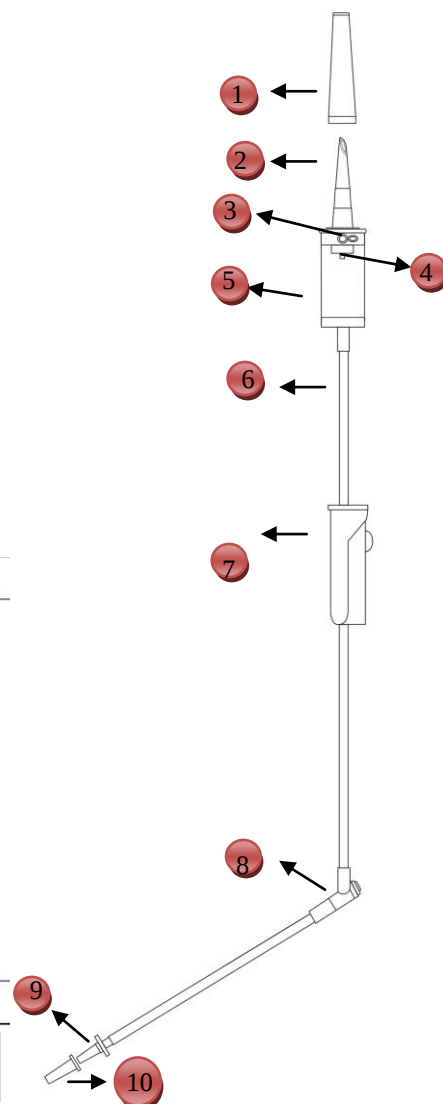

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2016	00	Joelma C. Brizola	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
01/2018	02	Joelma C. Brizola	Revisão embalagem
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex